

Grid 3 – program do komunikacji i sterowania otoczeniem

Podręcznik użytkownika

Dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących przez Altix Sp. z o. o.



Grid 3 jest oprogramowaniem AAC wspomagającym komunikację wspartą symbolami i tekstem.

Korzystanie z Grid w środowisku medycznym


Grid nie powinien być traktowany jako jedyny sposób na wykonywanie przez użytkownika połączeń alarmowych lub włączania alarmów. Grid nie jest przeznaczony do oceny stanu zdrowia użytkownika.

Grid 3 nie przechowuje online żadnych danych użytkownika bez jego zgody. Wszystkie dane dotyczące kont społecznościowych i e-mail są przechowywane lokalnie i nigdy nie są udostępniane.

Podczas tworzenia konta w Grid 3 zostaną wyświetlone ustawienia dotyczące prywatności. Za swoją zgodą Grid 3 może rejestrować historię czatów i wykorzystywać dane lokalizacji do wyświetlania podpowiedzi. Te dane są zawsze przechowywane lokalnie i nie są wysyłane do Smartboxa thinksmartbox.com/privacy-notice


Dla kogo jest przeznaczony Grid?

Dla użytkownika AAC w celach:

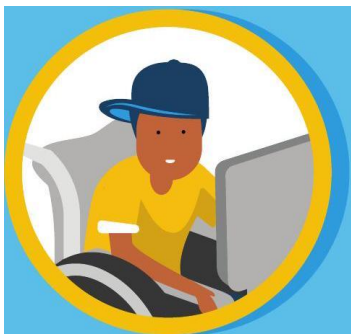

- Komunikacji.
- Stosowania aplikacji łatwego dostępu.
- Alternatywnego dostępu do innego oprogramowania.
- Sterowania urządzeniami otoczenia.

Dla asystenta użytkownika AAC w celach:

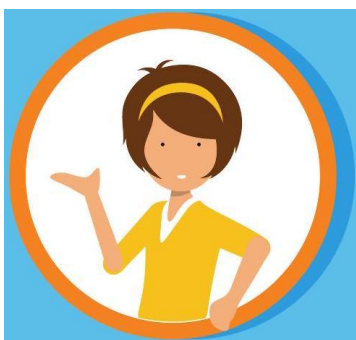

- Zmiany ustawień Grid.
- Tworzenia profili użytkowników Grid.
- Dodawania pakietów plansz.
- Edycji i tworzenia pakietów plansz.
- Zdalnej edycji.

Grid 3 to oprogramowanie przeznaczone na urządzenia z systemem Windows. Upewnij się, że przeczytałeś instrukcję i znasz zasady korzystania ze swojego urządzenia i z systemu operacyjnego Windows.

Spis treści

Grid 3 wprowadzenie	3
Pierwsze kroki	3
Czym jest AAC	7
Poznajemy Grid 3	8
Witamy w Eksploratorze plansz	10
Menu Eksploratora plansz.....	11

Ustawienia dostępu w Grid	12
Dostęp przy użyciu ekranu dotykowego	12
Dostęp za pomocą zewnętrznych przełączników	13
Dostęp poprzez sterowanie wzrokiem	13
Dostęp za pomocą wskaźnika myszy	13
Wybór głosu	13
Pakiety plansz	13
Wybór pakietów plansz	15
Pakiety plansz w zestawie	16
Dodawanie pakietów plansz	18
Alternatywne wersje pakietów plansz	19
Online Grids	19
Menu pakietu plansz	21
Korzystanie z pakietu plansz komunikacji symbolami	22
Korzystanie z pakietów plansz komunikacji tekstowej	23
Udostępnianie pakietów plansz	24
Więcej funkcji Grid	25
Ustawienia	25
Profil użytkownika	26
Tworzenie kopii zapasowej profilu użytkownika	26
Tryb edycji	27
Zdalna edycja	28
Aktualizowanie Grid	29
Pomoc	29
Wsparcie	29
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa	30
Wymagania systemowe	31

Grid 3 wprowadzenie

Pierwsze kroki



- Wybierz ikonę Grid na pulpicie w systemie Windows.
- Utwórz profil użytkownika.
- Wybierz głos.
- Połącz się z kontem Dropbox w celu tworzenia kopii zapasowych.
- Utwórz konto Smartbox.
- Wybierz pakiety plansz.




1. Skonfiguruj metodę dostępu i konta osobiste (e-mail, telefon).
2. Utwórz swój pakiet plansz i zacznij mówić.
3. Obsługuj inne aplikacje na swoim urządzeniu.
4. Eksploruj i ucz się.

Ten przewodnik zawiera podstawowe informacje dotyczące rozpoczynania pracy z Grid. By uzyskać więcej informacji odwiedź stronę thinksmartbox.com



1. Edytowanie i dostosowywanie plansz.
2. Zaawansowana edycja i funkcje.
3. Dostosowywanie alternatywnych metod dostępu i inne ustawienia.

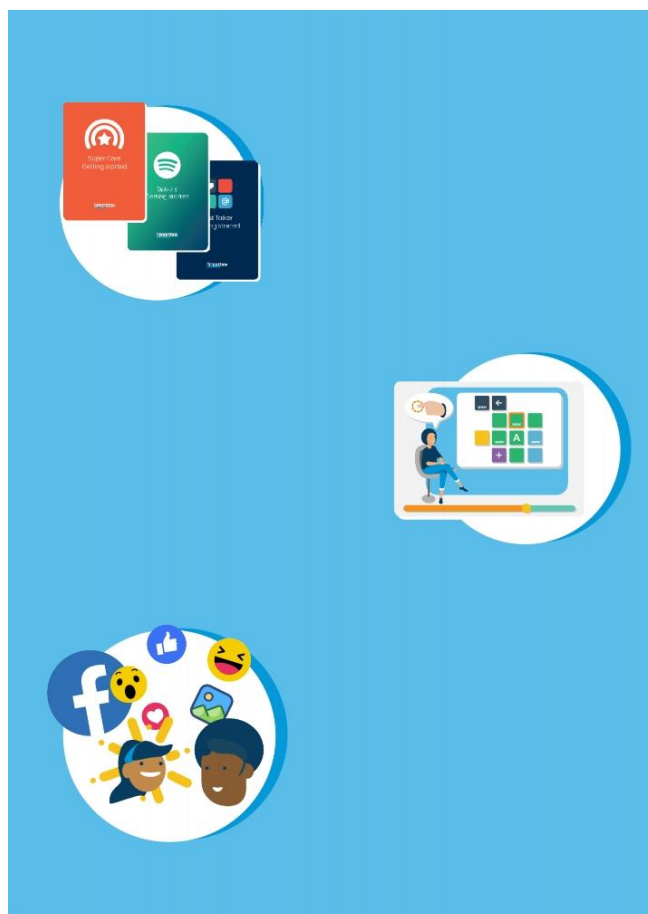

1. Przewodniki dotyczące pakietów plansz i inne materiały. Posiadamy szereg przewodników i innych materiałów zawierających wiedzę dotyczącą zestawów plansz.
2. Webinaria i tutoriale. Regularnie udostępniamy nagrania z webinarów. Można je obejrzeć na naszym kanale YouTube. Możesz również obejrzeć tutaj krótkie filmy instruktażowe.
3. Społeczność Grid. Przestrzeń, w której użytkownicy Grid, profesjonaliści i rodziny dzielą się pomysłami, zadają pytania i wspierają się nawzajem.

Czym jest AAC


AAC to skrót od Augmentative and Alternative Communication (komunikacja alternatywna i wspomagająca). Z metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej korzystają osoby niemówiące lub te, których mowa jest niezrozumiała dla otoczenia.

AAC może mieć różne formy. Osoby niemówiące mogą wspomagać się tekstem lub symbolami w celu przekazania komunikatu. Rozwiązania AAC obejmują szeroki zakres pomocy - od pomocy prostych, wykorzystujących tablice i książki służące komunikowaniu się, po zaawansowane technologicznie pomoce komunikacyjne, takie jak Grid Pad.

Korzystanie z Grid jako formy AAC

Grid wspiera szeroki zakres potrzeb, począwszy od nauki języka z wykorzystaniem słownictwa podstawowego, po szybkie tworzenie rozbudowanych zdań za pomocą wbudowanej klawiatury.

Grid oferuje wybieranie i dostosowywanie różnych głosów, wedle preferencji użytkownika.

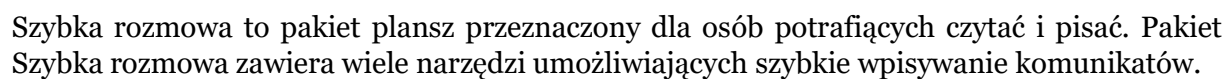




1. **Profil użytkownika.** W profilu użytkownika zapisane są wszystkie pakiety plansz, preferencje i inne ustawienia.




2. **Eksplorator plansz** to ekran główny, na którym znajdują się wszystkie pakiety plansz.

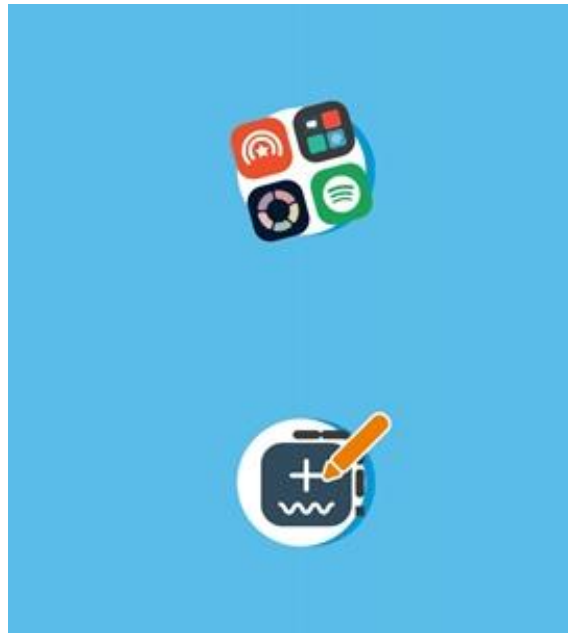

3. **Pakiet plansz** jest wewnętrzną aplikacją programu Grid, w której znajdują się wszystkie zasoby pozwalające na komunikację itp.
4. **Tryb edycji plansz** umożliwia edytowanie i dostosowywanie każdego pakietu plansz do indywidualnych potrzeb użytkownika. Ten tryb pozwala także na stworzenie od podstaw własnego pakietu plansz.

Witamy w Eksploratorze plansz

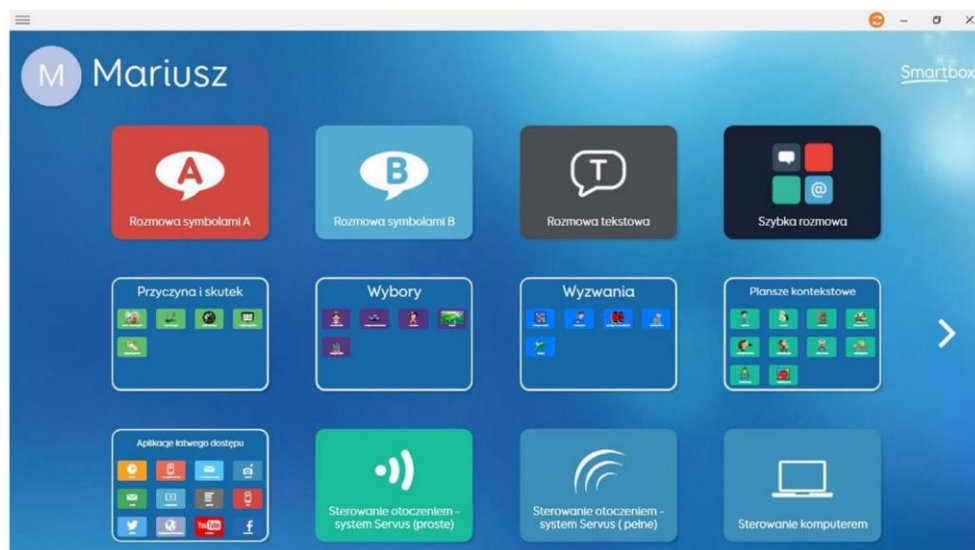

W Eksploratorze plansz znajdują się wszystkie pakiety plansz. Wybranie pakietu spowoduje jego otwarcie.


Eksplorator plansz jest w pełni dostępny. Możesz użyć metody dostępu dostosowanej do własnych potrzeb, by wybrać pakiet plansz i nawigować między poszczególnymi planszami.



Z poziomu menu programu dostępnych jest więcej opcji.

By powrócić do Eksploratora plansz z poziomu pakietu plansz wybierz Menu > Eksplorator plansz.

Wskazówka: Możesz ukryć menu Eksploratora plansz wybierając Ustawienia > Komputer. Może to być pomocne, jeśli korzystasz z dotyku jako metody dostępu.

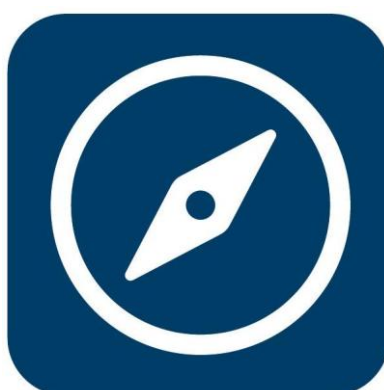

Jeśli chcesz wrócić do Eksploratora plansz poszukaj jego ikony (powyższy rysunek). Jest ona dostępna z poziomu wielu pakietów plansz.

Menu Eksploratora plansz



Dodaj pakiety plansz. Otwiera okno dodawania pakietów plansz.



Uporządkuj pakiety plansz. Porządkuje, tworzy foldery, usuwa pakiety z poziomu Eksploratora plansz.



Udostępnij pakiety plansz. Otwiera okno udostępniania pakietów plansz.



Zdalna edycja. Logowanie się do swojego konta Smartbox i uzyskiwanie dostępu do pakietów plansz zatwierdzonych użytkowników Grid.



Użytkownicy. Otwiera ekran użytkowników Grid.




Ustawienia dostępu w Grid. Przechodzi do ustawień Grid.



Pomoc. Otwiera okno pomocy programu Grid, gdzie dostępne są informacje dotyczące obsługi i wsparcia.

Ustawienia dostępu w Grid

Grid wspiera szeroki zakres metod dostępu, które można konfigurować z poziomu Menu > Ustawienia > Dostęp.

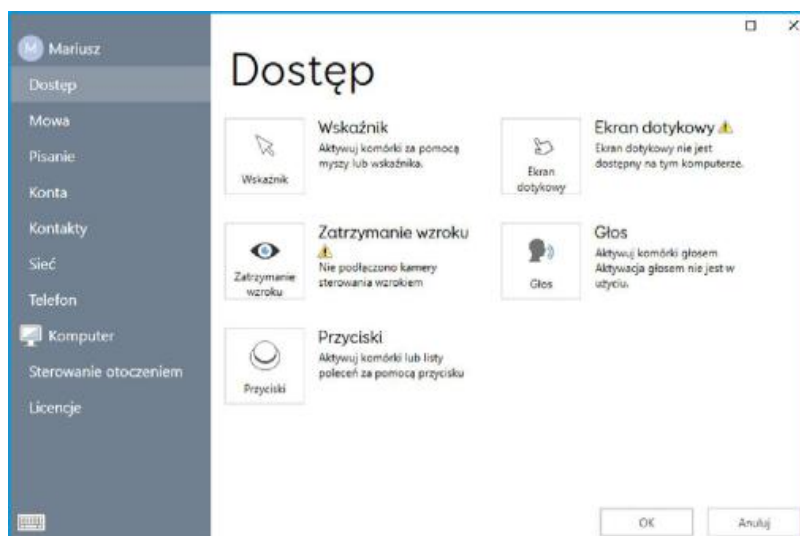

Jeśli urządzeniem, na którym korzysta się z Grid można sterować za pomocą dotyku, domyślnie wybrana jest metoda dostępu za pomocą dotyku lub za pomocą wskaźnika myszy.

Każda metoda dostępu ma szeroką gamę ustawień i opcji, które można zoptymalizować pod kątem własnych potrzeb.

Dostęp przy użyciu ekranu dotykowego

Ekran dotykowy urządzenia, na którym korzysta się z Grid umożliwia obsługę programu bezpośrednio za pomocą tego ekranu.

By zwiększyć precyzję gestów, można użyć ramek zabezpieczających. Użyj Ustawień w celu dostosowania opcji obsługi programu za pomocą ekranu dotykowego.

Dostęp za pomocą zewnętrznych przełączników

Podłącz przełączniki przez porty 3,5 mm, przez USB lub bezprzewodowo. Grid można skonfigurować tak, by skanował pakiety plansz na wiele sposobów. Grid akceptuje podłączenie do urządzenia wielu przełączników.

Dostęp poprzez sterowanie wzrokiem

Grid współpracuje z wieloma popularnymi urządzeniami do sterowania za pomocą wzroku. Wybierz rodzaj urządzenia z jakiego korzystasz i dostosuj ustawienia do swoich potrzeb.

Dostęp za pomocą wskaźnika myszy

Dostęp za pomocą wskaźnika myszy pozwala na obsługę programu za pomocą wielu urządzeń, począwszy od trackballi po myszy nagłowne. Użyj Ustawień, by określić sposób interakcji poprzez wskaźnik i wybrać preferencje klikania.

Wskazówka: Grid można również obsługiwać za pomocą głosu. Skonfiguruj tę opcję mówiąc "Hej Grid3!".

Wybór głosu

W Grid dostępnych jest ponad 200 głosów w 32 językach. Znajdują się one w Ustawienia > Mowa. Użyj rozwijanej listy dla danego kraju, by wybrać żądany głos i preferowany akcent. Wybierz Odtwórz, by posłuchać wybranego głosu.


Jeśli głos jest wyszarzony (nieaktywny), możesz pobrać go na swój komputer lub urządzenie mobilne, na którym korzystasz z Grid.

By dostosować brzmienie głosu do swoich potrzeb, ustaw jego wysokość i prędkość.




Wskazówka: Grid obsługuje także spersonalizowane głosy innych dostawców. Są one często tworzone z nagrań rzeczywistych głosów.

Pakiety plansz

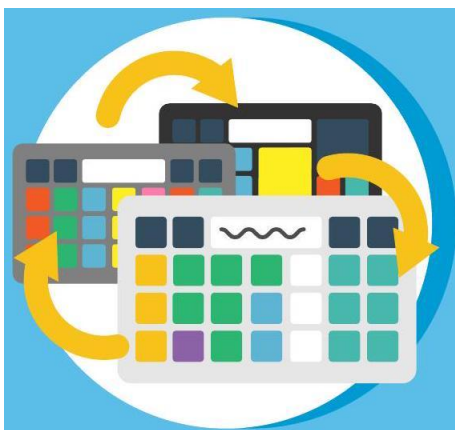

Pakiet plansz to zestaw plansz, które są ze sobą połączone. Każdy pakiet plansz utworzony jest do konkretnego celu, np. do komunikacji symbolami lub komunikacji e-mail.

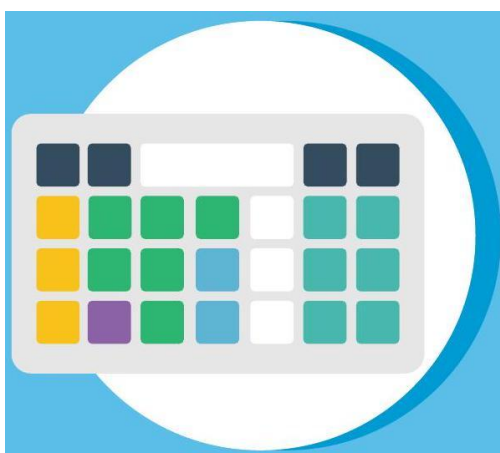

Plansza składa się z wierszy i kolumn, które zawierają komórki. Każda plansza może być obsługiwana za pomocą dowolnej metody dostępu.



Komórki mogą zawierać wyrazy, komunikaty, symbole i wiele dodatkowych elementów.

Do zestawów plansz dołączone są przewodniki zawierające wskazówki dotyczące funkcji danego pakietu, które mogą być pomocne podczas pierwszych kroków z wybranym pakietem plansz. Można je znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem thinksmartbox.com



Wybór pakietów plansz

Na ekranie z wyborem pakietów plansz są one podzielone na kategorie. Możesz wybrać te pakiety, które zamierzasz dodać do swojego profilu.



Komunikacja przy użyciu symboli. Zestawów plansz opartych na symbolach można używać do budowania podstawowego słownictwa lub tworzenia zdań w obrębie określonych tematów. Dostępne są tutaj opcje: Komunikacja symbolami A oraz Komunikacja symbolami B.



Komunikacja tekstowa. Używa ona zestawów plansz bazujących na tekście, zawierających różne układy klawiatur do wyboru i dodatkowe funkcje, np. bank komunikatów. Dostępne są tutaj pakiety, np. Szybka rozmowa, Rozmowa tekstowa.



Interaktywna nauka. Motywujące i zabawne ćwiczenia, które można wykorzystać do wprowadzania rozumienia zależności przyczynowo - skutkowych i do nauki umiejętności dokonywania wyboru. Interaktywna nauka to doskonały sposób zapoznawania się z różnymi metodami dostępu poprzez animacje i gry.



Aplikacje łatwego dostępu. Korzystanie z mediów społecznościowych z aplikacjami na X (Twitter) i Facebook, słuchanie muzyki ze Spotify, oglądanie filmów na YouTube, przeglądanie internetu itp.



Sterowanie otoczeniem, system Servus. Jeśli urządzenie ma wbudowaną podczerwień do bezprzewodowej komunikacji, bezpośrednio z poziomu programu Grid można sterować telewizorem, sprzętem Hi-Fi i urządzeniami elektrycznymi.




Sterowanie komputerem. Używanie Grid do obsługi systemu Windows, programu Microsoft Office, przeglądarki internetowej, gier itp.

Jeśli nie chcesz dodawać żadnych pakietów do swojego profilu, wybierz opcję „Żadne”. W dowolnym momencie możesz dodawać i usuwać pakiety plansz.


Pakiety plansz w zestawie

Komunikacja symbolami

Rozmowa symbolami A oraz B.

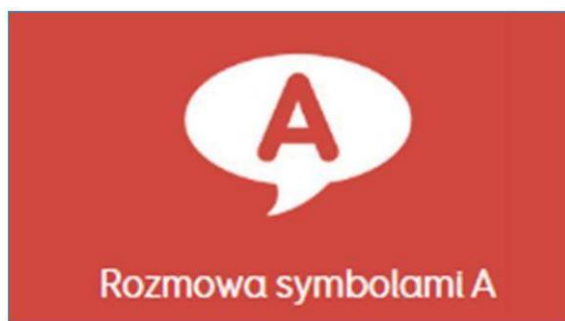

Rozmowa symbolami A.

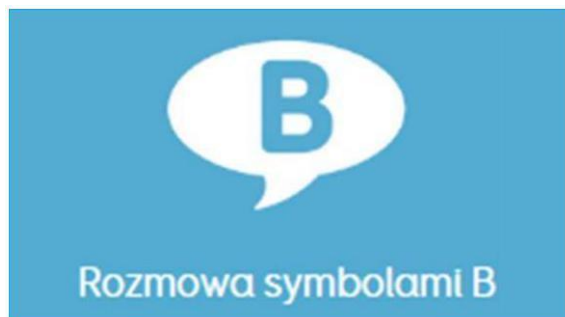


Rozmowa symbolami B.

Komunikacja tekstowa



Szybka rozmowa

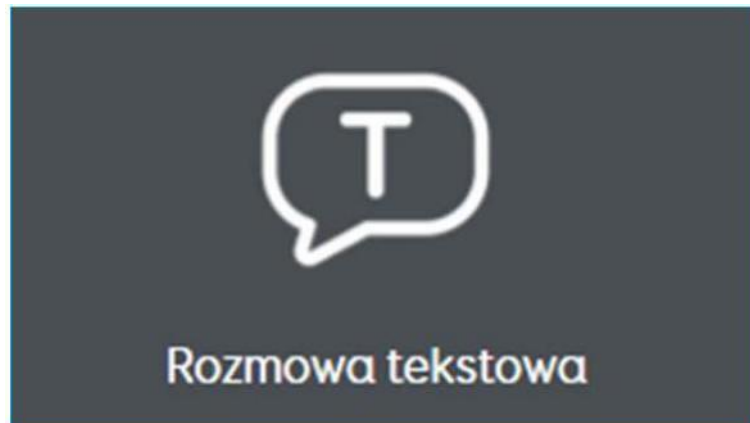

Rozmowa tekstowa

Interaktywna nauka

Jej elementy to:

- Przyczyna i skutek.
- Wybory.
- Wyzwania.
- Plansze kontekstowe.

Aplikacje łatwego dostępu


- Facebook




- X (Twitter)
- YouTube
- YouTube Kids
- Muzyka i film



- Aparat
- Zegar

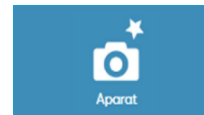

- Przeglądarka internetowa
- SMS
- Telefon
- E-mail
- Notatki.

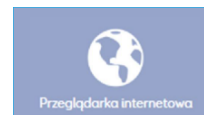


Sterowanie

- Sterowanie otoczeniem – system Servus (pełne).
- Sterowanie otoczeniem – system Servus (proste).
- Sterowanie komputerem.
- Sterowanie komputerem za pomocą przycisków.

Dodawanie pakietów plansz

Możesz dodać kolejne pakiety plansz do Eksploratora wybierając z Menu opcje Dodaj pakiety plansz.

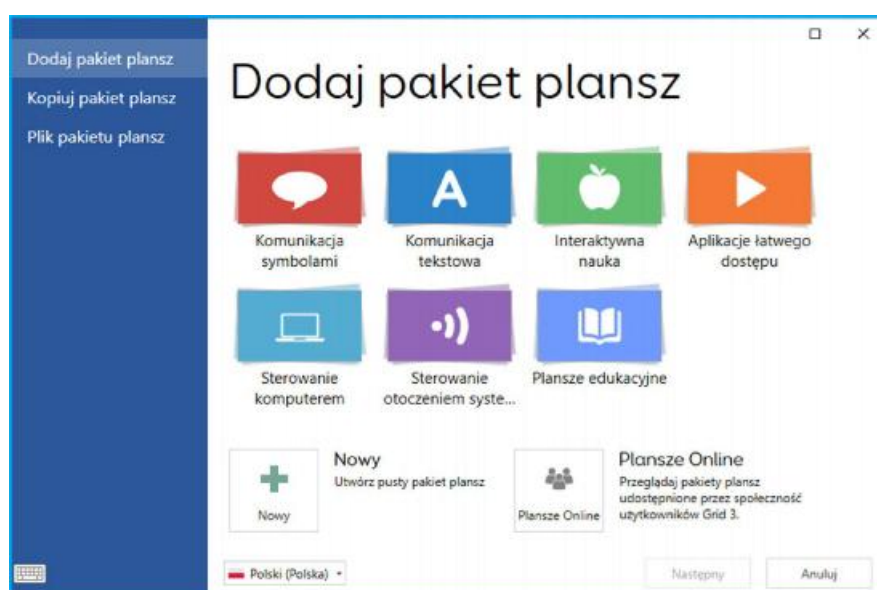


Pakiety plansz podzielone są na kategorie. Każdy pakiet jest opisany, dzięki czemu możesz dowiedzieć się o nim więcej przed jego dodaniem.

Alternatywne wersje pakietów plansz

Dla wielu pakietów plansz dostępne są alternatywne wersje. Są to wersje z różnymi zestawami symboli, z ulepszeniami dla określonych metod dostępu, takich jak dotyk, przełączniki lub alternatywne klawiatury i inne. Alternatywne wersje dostępne są w oknie Dodawanie pakietów plansz.


Inne języki

Wiele pakietów przetłumaczono na inne języki. Możesz zmienić język okna dodawania pakietów plansz za pomocą rozwijanego menu wyboru języka.

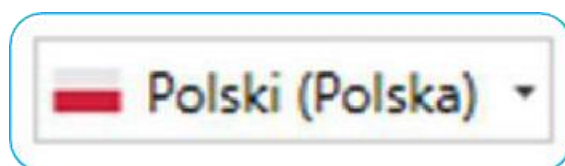

Online Grids

Online Grids to serwis, w którym można znaleźć pakiety plansz spełniające różnorodne zadania. W serwisie dostępnych jest tysiące pakietów zaprojektowanych przez społeczność użytkowników programu Grid.

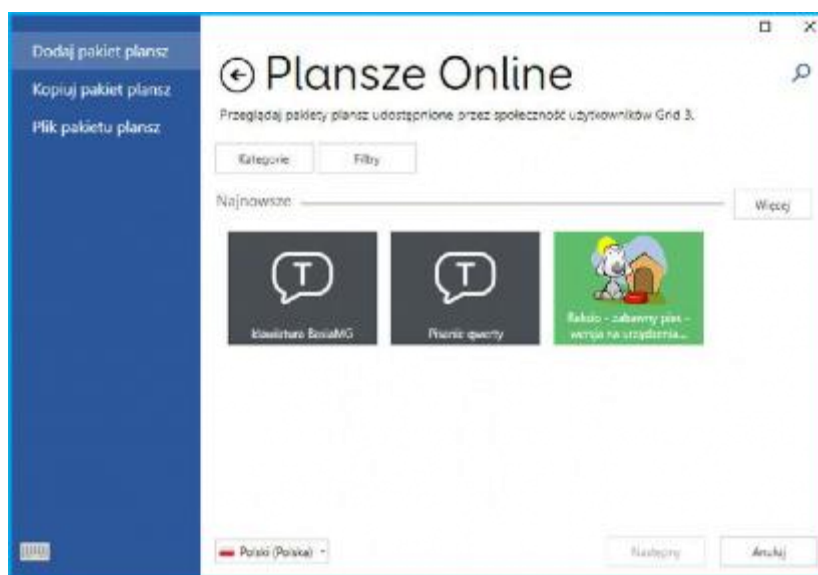

Po wybraniu opcji Online Grids w oknie Dodawania pakietów plansz, można zobaczyć wyróżnione i aktualnie udostępnione pakiety plansz. Pakiety można wyszukiwać korzystając z lupy, jak również z filtrów i kategorii.


Poniżej znajdują się trzy przykładowe zestawy plansz udostępnione przez zespół ekspertów Smartbox.



Soundbox utworzony przez Jima. Pakiet plansz Soundbox pozwala użytkownikom Grid 3 tworzyć własną muzykę.



Mój paszport komunikacji utworzony przez Jess. Praktyczne narzędzie pozwalające na przekazywanie podstawowych informacji osobom z dysfunkcjami w zakresie mowy i języka, osobom które mogą mieć problemy z komunikacją.

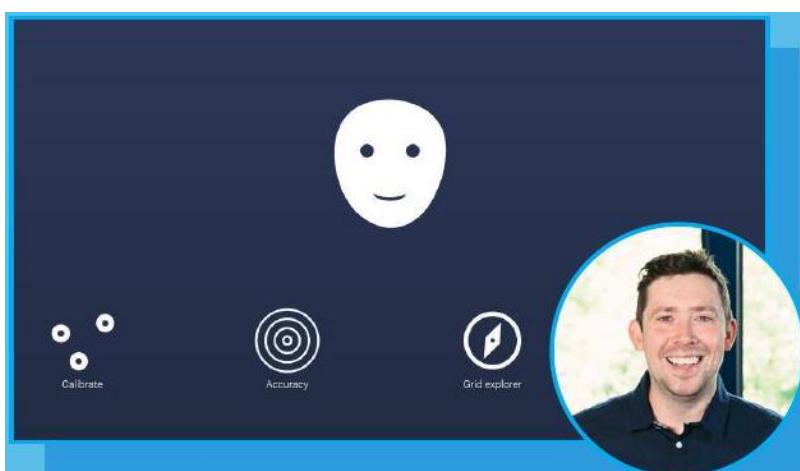

Przewodnik pozycji utworzony przez Neila. Pakiet plansz, który może być pomocny podczas ustalania odpowiedniej pozycji dla sterowania wzrokiem.

Menu pakietu plansz

Gdy otwarty jest pakiet plansz, zmienia się menu i można uzyskać dostęp do dodatkowych opcji.



Plansza bazowa. Powrót do głównej planszy danego pakietu plansz.



Wstecz. Przejście o jedną planszę wstecz.



Eksplorator plansz. Zamyka pakiet plansz i przechodzi do Eksploratora plansz.



Edytuj planszę. Uruchamia planszę w Trybie edycji pozwalając na wprowadzenie zmian do planszy.



Edytuj Listę słownictwa. Pozwala na edycję Listy słownictwa, jeśli została ona dodana do planszy.



Ustawienia. Otwiera opcje Ustawień Grid.



Znajdź wyraz. Otwiera narzędzie wyszukiwania wyrazów, dzięki któremu można wyszukiwać wyrazy w pakiecie plansz i przechodzić do nich.




Drukuj. Drukuje planszę lub pakiet plansz.




Podręcznik użytkownika pakietu plansz. Otwiera przeglądarkę internetową, umożliwiając pobranie dodatkowych dokumentów.




Pomoc. Otwiera okno pomocy Grid, w którym można sprawdzić, gdzie uzyskać dostęp do dalszej pomocy.

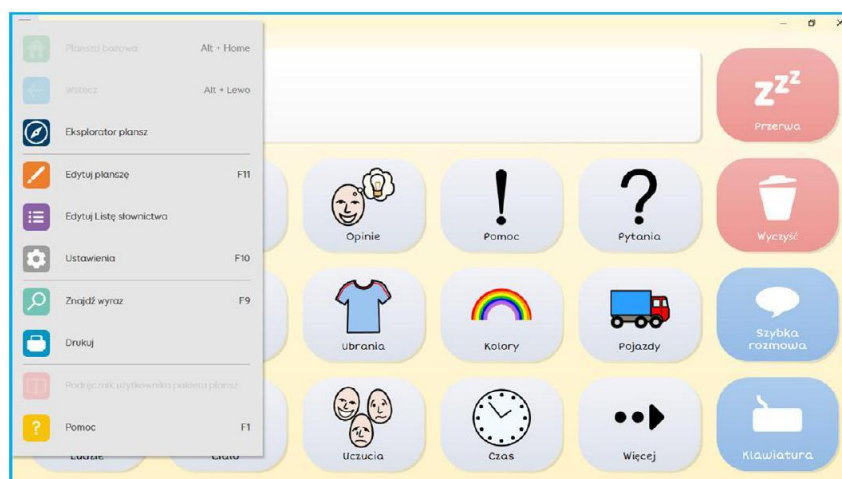

Korzystanie z pakietu planz komunikacji symbolami

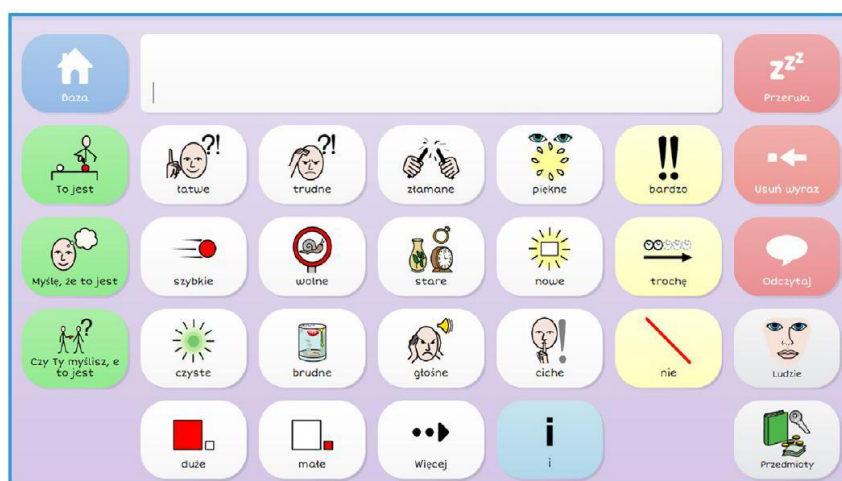


Powyżej widoczny jest przykład planzy wspartej symbolami. Planza składa się z komórek, w każdej komórce znajduje się określony wyraz i reprezentujący go symbol.

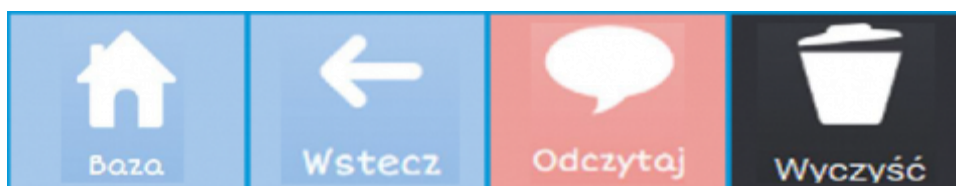

Do komórek górnego wiersza przypisane są różne polecenia. Tutaj dostępny jest również obszar wpisywania komunikatu.




Podczas tworzenia wypowiedzi wyrazy i zdania będą wpisywane do tego obszaru.

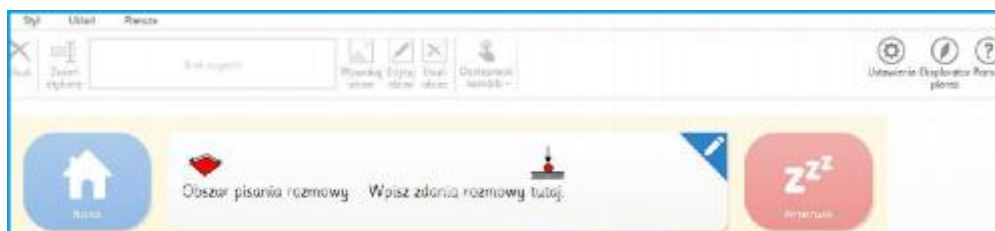

Niektóre komórki oznaczone są niewielkim trójkątem znajdującym się w prawym, górnym rogu. Są to tzw. Komórki przejścia. Ich aktywacja powoduje przejście do kolejnej planszy z większą ilością słów, bądź do planszy dotyczącej konkretnego tematu lub zagadnienia. Wybranie komórki Wstecz lub opcji Wstecz z menu pozwoli przejść do poprzednio wyświetlanej planszy.

Korzystanie z pakietów plansz komunikacji tekstowej

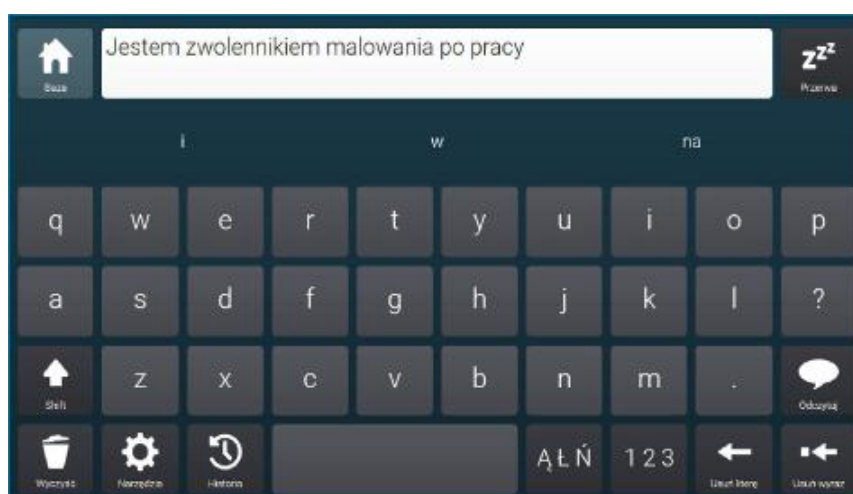

Powyżej widoczne jest okno Szybka rozmowa. Jest to pakiet plansz bazujący na tekście z wieloma funkcjami przyspieszającymi wpisywanie komunikatów. Komunikat wyświetlany jest w tzw. Obszarze pisanie rozmowy, w górnej części planszy. Po prawej stronie znajduje się komórka pozwalająca na odczytanie zawartości tego obszaru.

Predykcja i historia rozmowy

Możesz przełączać się pomiędzy Predykcją a Historią rozmowy za pomocą komórki Historia. Komórki Predykcji lub Historii rozmowy są wyświetlane poniżej Obszaru pisanie rozmowy. Grid korzysta z predykcji SwiftKey, która sugeruje (podpowiada) wpisywane słowo i kolejne możliwe słowo. Opcja Historii rozmów pozwala na zapamiętywanie wszystkiego co mówisz i na szybki powrót do tych komunikatów. Wpisz słowo kluczowe w zdaniu, na przykład „kawa”, by zobaczyć szereg pokrewnych wyrażen.

Alternatywne klawiatury

Wiele zestawów plansz bazujących na tekście ma klawiatury o alternatywnym układzie, np. z dużymi klawiszami, z najczęściej używanymi klawiszami, ze znakami diakrytycznymi itp.



Dostępne są one z poziomu ustawień zestawu plansz lub jako wersje alternatywne w oknie dodawania pakietów plansz.

Udostępnianie pakietów plansz

Zestawy plansz możesz udostępniać innym osobom i przenosić je między urządzeniami.

Online Grids

Pakiety plansz możesz udostępniać innym użytkownikom programu Grid za pośrednictwem serwisu Online Grids. By to zrobić, musisz mieć konto Smartbox. W Eksploratorze plansz wybierz Menu > Udostępnij pakiety plansz. Zobaczysz tutaj wszystkie aktualnie udostępnione pakiety plansz. Wybieranie opcji Dodaj wyświetli listę wszystkich pakietów, które możesz udostępnić. Wybierz pakiet plansz, wprowadź jego opis i odpowiednio oznacz pakiet. Plansze udostępnione w serwisie Online Grids można w dowolnej chwili aktualizować lub usuwać.

Zapisywanie pliku pakietu plansz

Zestawy plansz można zapisać w postaci pliku. Wybierz z menu Udostępnij pakiety plansz > Udostępnij pakiet plansz, następnie zaznacz pakiet i wybierz Zapisz.



Możesz wybrać miejsce na urządzeniu, w którym chcesz zapisać pakiet plansz, w tym pamięć USB, dyski zewnętrzne lub inne udostępnione foldery. By otworzyć zapisany plik pakietu plansz, kliknij na nim dwukrotnie. Zostanie on automatycznie dodany do Eksploratora plansz.


Korzystanie z wielu urządzeń

Jeśli zalogujesz się na swoje konta Smartbox i Dropbox na innym urządzeniu lub w Grid dla iPad, Twoje zestawy i ustawienia zostaną automatycznie zsynchronizowane. Możesz edytować i aktualizować swoje pakiety plansz na dowolnym urządzeniu, a zmiany będą widoczne w obu miejscach.

Więcej funkcji Grid

Ustawienia

By przejść do ustawień Grid wybierz Menu > Ustawienia.

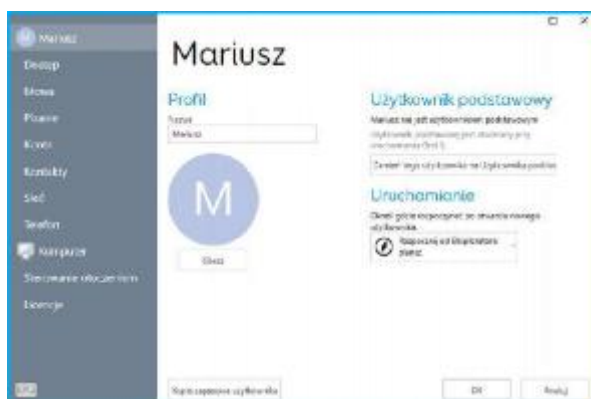

Użytkownik

Tutaj możesz zmienić swoją nazwę profilu, zdjęcie i opcje uruchamiania. Możesz także ustawić siebie jako głównego użytkownika, który będzie automatycznie wczytywany podczas uruchamiania programu.

Dostęp

Skonfiguruj metody dostępu. Możesz wybrać pomiędzy zewnętrznym przełącznikiem, za pomocą dotyku, za pomocą wskaźnika myszy, sterowanie za pomocą oczu lub za pomocą poleceń głosowych.

Mowa

Tutaj możesz dostosować wszystkie opcje głosu i mowy, a także informację zwrotną audio, jeśli jest włączona.

Pisanie

Decyduj o tym co się dzieje podczas pisania wiadomości, w tym o automatycznym zastępowaniu, historii rozmów i symbolach.

Konta

Zarządzaj swoimi kontami Smartbox, Dropbox, email.

Kontakty

Dodawaj i zarządzaj kontaktami dla plansz telefonu i emaila.

Sieć

Zarządzaj ulubionymi i opcjami filtrowania treści.

Telefon

Połącz smartfon z Grid, by wykonywać i odbierać połączenia, i wysyłać wiadomości tekstowe.

Komputer

Zarządzaj wyglądem paska menu, a także wybierz kamery internetowe i drukarki dla Grid.

Sterowanie otoczeniem

Skonfiguruj urządzenia do sterowania otoczeniem na kompatybilnym sprzęcie.

Licencje

Sprawdź czy masz aktywne licencje na głosy, biblioteki symboli lub zestawy plansz.

Profil użytkownika

Grid obsługuje wiele profili użytkownika z:

- Pakietami plansz
- Informacjami o koncie
- Ustawieniami
- Plikami banku komunikatów
- Twoim układem Eksploratora plansz
- Predykcją i historią rozmowy
- Słownikami
- Kontaktami
- Notatkami
- Emailiem i wiadomościami tekstowymi.


Jeden użytkownik może być oznaczony jako Użytkownik podstawowy. Jego profil będzie się otwierał podczas uruchamiania programu Grid.

Wskazówka: Możesz także wybrać, który pakiet plansz ma się otwierać po uruchomieniu Grid, by móc od razu się komunikować.



Tworzenie kopii zapasowej profilu użytkownika

Jeśli chcesz wykonać kopię zapasową całego profilu użytkownika, by bezpiecznie zachować dane lub przenieść profil na inne urządzenie, możesz wykonać pełną kopię użytkownika Grid, wybierając Menu > Ustawienia > Użytkownik.

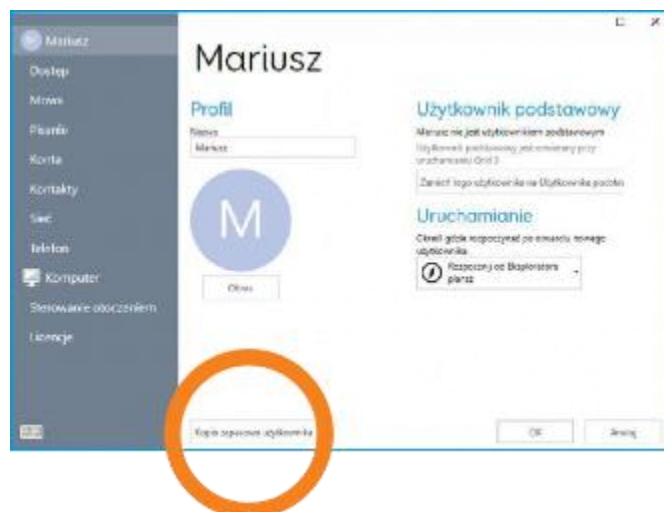

W dolnej części okna ustawień użytkownika znajduje się przycisk Kopia zapasowa użytkownika. Wybierz tę opcję, by określić miejsce, w którym chcesz zapisać kopię danych użytkownika.

Przywracanie kopii zapasowej

Możesz przywrócić kopię zapasową danych użytkownika, przechodząc do Menu > Użytkownicy. Wybierz opcję Przywróć kopię zapasową, by zlokalizować plik kopii zapasowej na urządzeniu, a następnie wybierz opcję Otwórz.

Tryb edycji

Tryb edycji pozwala edytować i dostosowywać dowolny pakiet plansz, a także tworzyć nowy pakiet plansz. W Trybie edycji możesz dowolnie zmieniać wygląd plansz i funkcje każdej komórki. Może to być po prostu dodanie wyrazu do planszy poprzez utworzenie nowej komórki pisania lub dodanie do komórki bardziej złożonego polecenia np. wykonywania zdjęć.





Wygląd. Decyduj o rozmiarze, kształcie i kolorze każdej komórki.



Etykieta. Dostosowuj rozmiar i kolor czcionki etykiety komórki.




Symbol. Zmieniaj lub edytuj symbol dowolnej komórki. Możesz również dodać zdjęcie.

Zdalna edycja

Funkcja Zdalnej edycji pozwala na przyznanie innej osobie dostępu do pakietów plansz w celu wprowadzania zmian z innego urządzenia. Możesz nadal korzystać z Grid 3 podczas edytowania treści. By funkcja Zdalnej edycji była dostępna musisz być zalogowany do konta Smartbox i Dropbox.

Przekazywanie innej osobie dostępu do pakietów plansz

Możesz zezwolić innym użytkownikom na logowanie się na innym urządzeniu w celu edycji Twoich pakietów plansz. Wybierz Menu > Ustawienia > Konta, następnie Zdalna edycja.

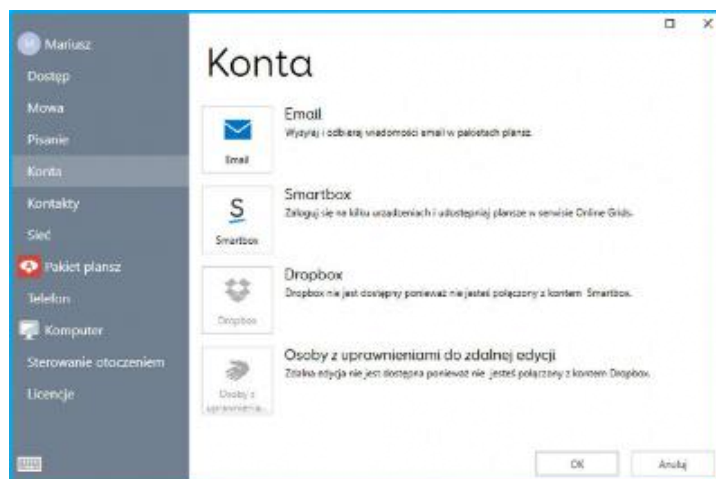

Redaktorzy

Wpisz adres email osoby, która będzie miała uprawnienia do zdalnej edycji i wybierz Dodaj. Osoba ta otrzyma wiadomość email z zaproszeniem do założenia konta Smartbox i zainstalowania Grid.

Wskazówka: Do Zdalnej edycji nie jest wymagana licencja na program Grid!

Edytowanie pakietów plansz innego użytkownika

Jeśli otrzymałeś dostęp do zdalnej edycji zestawów plansz innego użytkownika, zaloguj się z ekranu startowego Grid. Wybierz opcję Zdalna edycja i zaloguj się na swoje konto Smartbox. Zobaczysz listę użytkowników, którzy zaprosili Cię do edycji. Wybierz użytkownika, a zostaniesz przeniesiony do jego Eksploratora plansz. Stąd możesz swobodnie otwierać zestawy plansz i przechodzić do trybu edycji, by wprowadzać zmiany.

Aktualizowanie Grid

Grid jest nieustannie rozwijany w celu wprowadzania nowych funkcji, zawartości i korekty błędów, dlatego zawsze zalecamy aktualizowanie Grid do najnowszej wersji. Gdy urządzenie jest połączone z internetem, Grid automatycznie będzie wyszukiwać aktualizacji podczas uruchamiania. Gdy dostępna jest aktualizacja, w prawym, górnym rogu ekranu pojawi się ikona aktualizacji. Należy kliknąć tę ikonę, by zaktualizować program.




Jak korzystać z aplikacji Smartbox Update?

Dostępność aktualizacji można również sprawdzić ręcznie za pomocą funkcji Smartbox Update. Program Smartbox Update znajduje się w menu Start.

Pomoc

Wsparcie

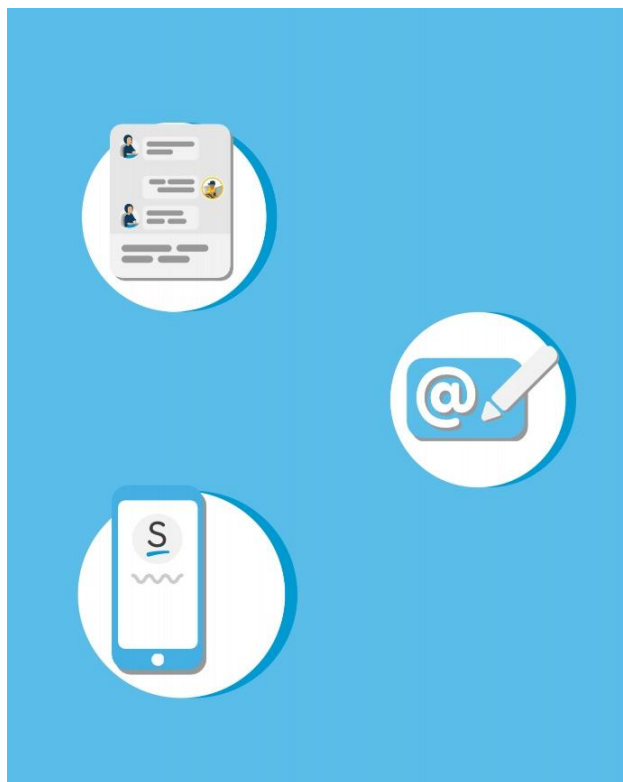

Nasz zespół wsparcia jest po to, by pomoc była zawsze dostępna za pośrednictwem:

- rozmów na czacie thinksmartbox.com,
- poczty email: support@thinksmartbox.com,
- telefonów w Wielkiej Brytanii: 01684 578868 i USA: (878) 302-3674.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Grid 3 służy jako pomoc w komunikacji głosowej,
- Grid 3 służy do wspierania obsługi systemu operacyjnego Windows,
- Grid 3 służy do sterowania urządzeniami zewnętrznymi poprzez funkcje sterowania otoczeniem.

Użytkownik docelowy

Grid 3 przeznaczony jest dla użytkowników o złożonych potrzebach komunikacyjnych i potrzebach alternatywnego dostępu.

Docelowe środowisko

Grid 3 można używać w różnych środowiskach, między innymi:

- w domu,
- w wyspecjalizowanych ośrodkach,
- w placówkach opieki,
- w szkołach,
- na uczelniach,
- w codziennych sytuacjach, np. w sklepie, w restauracji,
- w szpitalach.

Istotne przeciwwskazania, ostrzeżenia i środki ostrożności

Grid 3 ma pomóc w ekspresyjnej komunikacji. Grid 3 powinien być stosowany w połączeniu z szeregiem różnych metod komunikacji wspomagającej i alternatywnej (AAC). W związku z tym nie należy polegać na Grid jako na jedynej metodzie wspomagającej komunikację. Inne metody AAC mogą obejmować wykorzystanie innych **papierowych pomocy komunikacyjnych**, języka migowego lub ramek do wskazywania wzrokiem. Mimo, że Grid został opracowany i zaprojektowany w celu zapewnienia maksymalnej niezawodności, może dojść do zakłócenia jego funkcjonowania na skutek przerw w zasilaniu lub innych problemów technicznych. Z tego powodu Grid 3 nie powinien być używany jako:

- urządzenie podtrzymujące życie,
- źródło poprawy samopoczucia użytkownika,
- jedyny sposób wykonywania przez użytkownika połączeń alarmowych lub uruchamiania alarmu,
- narzędzie do podawania leków,
- jedyna metoda sterowania urządzeniami zewnętrznymi.

Zadaniem Grid 3 nie jest także dostarczanie informacji, które służą podejmowaniu decyzji diagnostycznych lub terapeutycznych.

Wymagania systemowe

- Procesor czterordzeniowy 1,33 GHz lub szybszy.
- Pamięć 2 GB pamięci RAM lub więcej.
- Dysk twardy 3 GB + miejsce na HDD.
- System operacyjny Windows 8, 8.1, 10 Home i Pro, Windows 11 Home i Pro.



Dołącz do społeczności Smartbox. To przyjazne miejsce, gdzie użytkownicy Grid dzielą się pomysłami, zadają pytania itp.

<https://www.facebook.com/groups/smartboxcommunity/>



Wydobądź więcej z Grid. Uzyskaj więcej informacji i wskazówek dotyczących edycji, a także zaawansowanych funkcji w naszym centrum szkoleniowym online <https://thinksmartbox.com/smartbox-academy/>

Dokument źródłowy: Getting Started with Grid.

Podręcznik w języku polskim (PL).

Data wydania czerwiec 2021.

Copyright 2020 Smartbox Assistive Technology thinksmartbox.com.