

**Baza STEP-HEAR™ z Panelem
Słonecznym i zestawem do
montażu (SH-300)**

Polski

**Przewodnik
użytkownika**



System nawigacji i informacji

ZAWARTOŚĆ

ZAWARTOŚĆ	1
WSTĘP	2
Rozpakowywanie Bazy	3
OPIS	4
Baza	4
INSTALACJA	6
Używanie Bazy z Panelem Słonecznym	6
Montowanie na słupie	6
Montowanie na ścianie	9
UŻYWANIE BAZY	12
Ustawienie włączania/wyłączania stanu czuwania	12
Ustawienie zasięgu działania	12
Ustawienie włączania/wyłączania nagrywania	13
Nagrywanie Komunikatów	14
Nagrywanie komunikatu przez zewnętrzny sprzęt audio	15
Ustawienie poziomu głośności	15
Rozwiązywanie problemów	17
INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE	17
GWARANCJA (EU)	18
GWARANCJA (USA)	20
DYREKTYWY RECYKLINGU	22

WSTĘP

Gratulujemy zakupu Bazy STEP-HEAR™. System STEP-HEAR™ składa się z dwóch elementów: odpornego na warunki pogodowe nadajnika (bazy i małego odbiornika /aktywatora). Natychmiast po zainstalowaniu, baza wysyła ciągły sygnał. Aktywator - trzymany przez użytkownika - wibruje i wydaje dźwięki pikania, gdy jest w zasięgu bazy. Naciśnięcie przycisku na Aktywatorze, wyzwala w bazie odtwarzanie wcześniej nagranej informacji głosowej. W ten sposób można uzyskać informacje, które pomogą użytkownikom odnaleźć ich cel podróży.

Baza posiada także funkcję, która umożliwi automatyczne zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności, zależnie od poziomu natężenia otaczającego hałasu.

Aby w pełni wykorzystać możliwości systemu STEP-HEAR™ należy koniecznie przeczytać niniejszą instrukcję. Prosimy zachować Przewodnik użytkownika w bezpiecznym miejscu, aby móc go użyć w przyszłości.

Podręcznik ten objaśnia sposób użycia następujących elementów:

Baza STEP-HEAR™ z Panelem Słonecznym (SH-300)

WSTĘP

Rozpakowanie Bazy

Rozpakowując bazę, znajdą Państwo w pudełku następującą zawartość:

- 1 Jednostkę Bazy
- 1 Panel Słoneczny z kablem
- 1 Zestaw montażowy zawierający wspornik montażowy na ścianę, wspornik pierścieniowy i śrubokręt
- 1 Przewodnik użytkownika




Aby uzyskać pomoc i wsparcie techniczne dotyczące produktu, prosimy odwiedzić naszą stronę Web pod adresem

www.step-hear.com

Kontakt Geemarc -01707 372372
lub Geemarc Francja- +33 (0) 3 28 58 75 75


OPIS

Baza

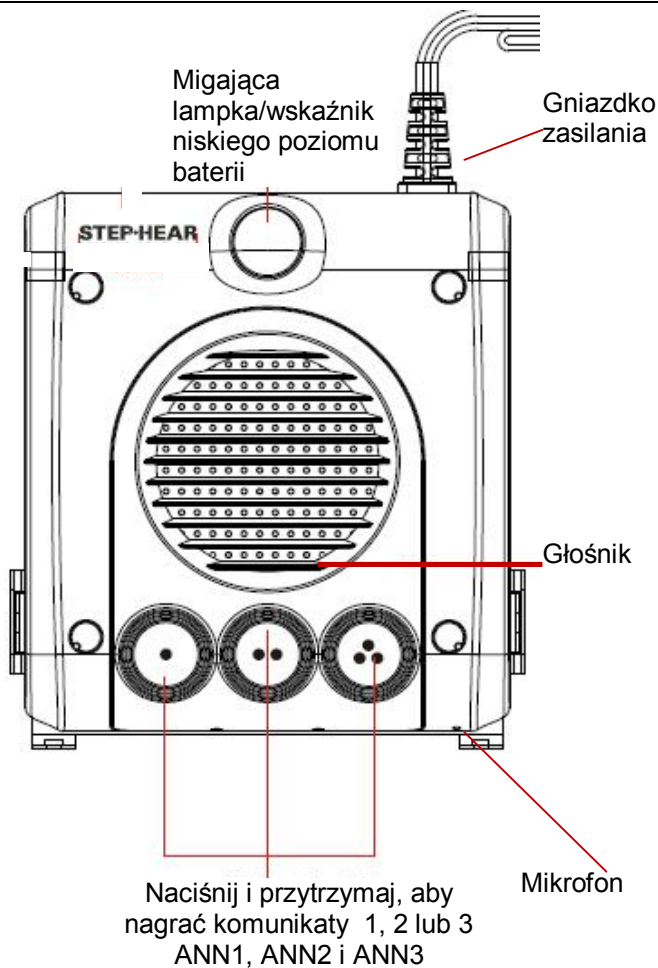

OPIS

Góra bazy

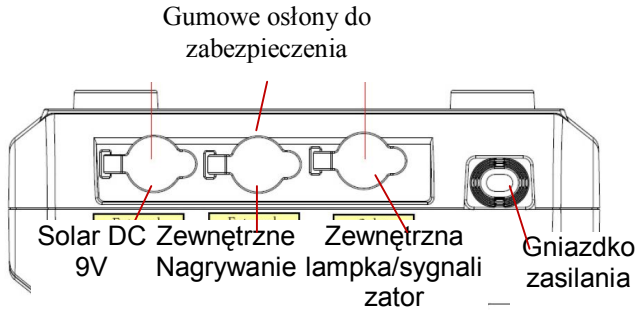

Baza z Panelem Słonecznym



INSTALACJA

Używanie Bazy z Panelem Słonecznym

Zaraz po zamontowaniu Panelu Słonecznego na Bazie, wetknij kabel zasilania do gniazdka solar DC9V znajdującego się w górnej części bazy. Zasilanie słoneczne, to tani i prosty sposób zasilania bazy STEP-HEAR™ . Oczywiście, nie potrzeba żadnego innego źródła zasilania. Po załadowaniu baterii, Panel Słoneczny pracuje dobrze nawet w dni, gdy emisja światła słonecznego jest słaba.


Montowanie na słupie

SH-300 jest przystosowany do przytwierdzenia go do słupa, tak jak latarnie uliczne.

Prosimy zwrócić uwagę, na: Użyj dostarczonego śrubokręta. Jest to jedyny typ śrubokręta, który będzie pasował do dostarczonych śrub.

- 1) Przykręć wspornik pierścieniowy (D) do wspornika montażowego Panelu Słonecznego (C)
- 2) Przykręć wspornik montażowy Panelu Słonecznego do bazy (B).
- 3) Przykręć Panel Słoneczny (A) do wspornika montażowego Panela Słonecznego
- 4) Podłącz kabel (E) do bazy (B)
- 5) Umieść wspornik pierścieniowy (D) wokół przeznaczonego miejsca na przykład słupa sygnalizacyjnego i skręć te dwie połowy z sobą.

INSTALACJA

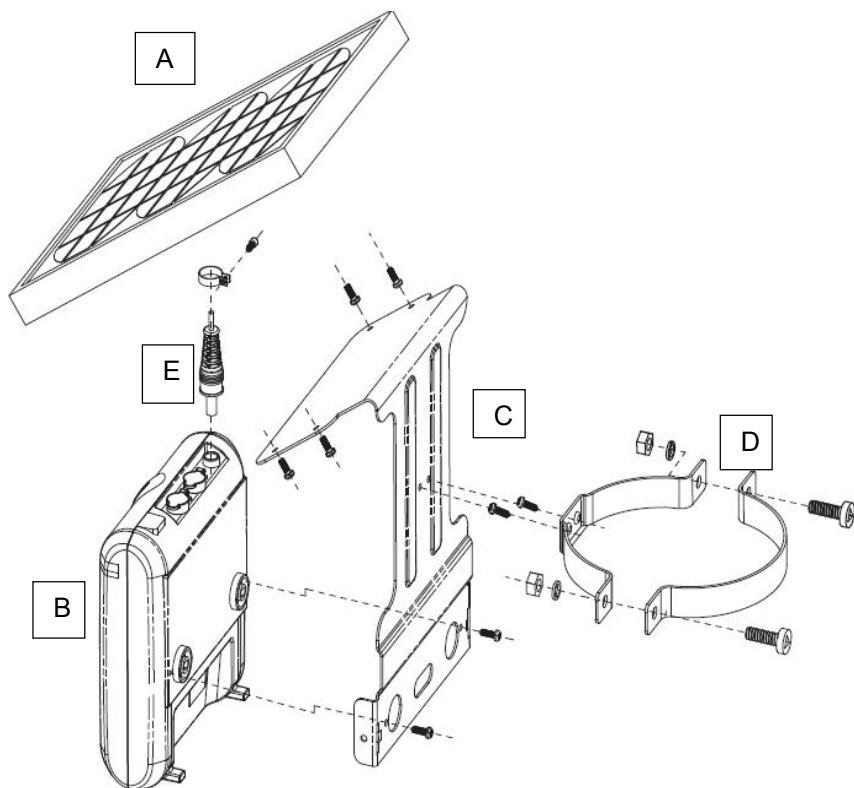

INSTALACJA

Złożone montowanie na słupie




INSTALACJA

Montowanie na ścianie

SH-300 jest przystosowany do montowania na ścianie. **Prosimy zwrócić uwagę, na:** Użyj dostarczonego śrubokręta. Jest to jedyny typ śrubokręta, który będzie pasował do dostarczonych śrub.

- 1) Przymocuj ścienną płytkę montażową (C) do ściany w wybranym miejscu, używając dwóch śrub (z kompletu).
- 2) Przykręć wspornik montażowy Panelu Słonecznego do bazy (B).
- 3) Przykręć Panel Słoneczny (A) do wspornika montażowego Panela Słonecznego
- 4) Podłącz kabel (E) do bazy (B)
- 5) Zrób dwa kolejne otwory w ścianie dla śrub zabezpieczających (F).
- 6) Zepnij bazę (z płytką zabezpieczającą właśnie przymocowaną) do ściennej płytki montażowej. Aby zabezpieczyć, umieść dwie śruby (F).

INSTALACJA

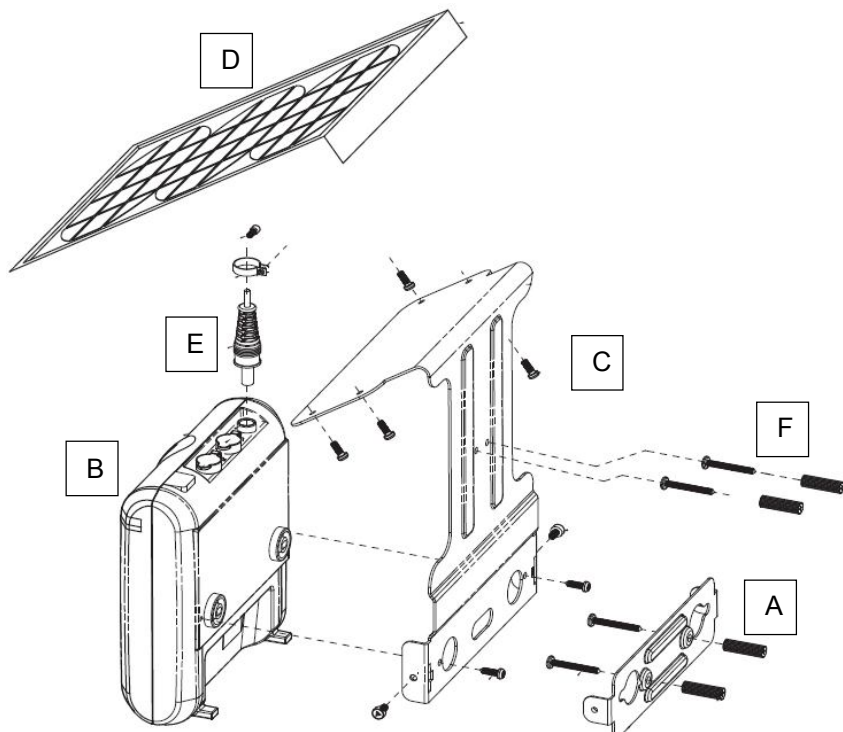

INSTALACJA

Złożone montowanie na ścianie



UŻYWANIE BAZY

Ustawienie włączania/wyłączania stanu czuwania

Jeśli chcesz ustawić bazę do stanu czuwania np. nie będzie używana przez długi okres czasu, naciśnij i przytrzymaj przyciski 1 i 3 razem przez 2 sekundy. Biała dioda zamiga trzy razy. Aby ponownie włączyć zasilanie i kontynuować transmisję RF, naciśnij poprostu dowolny klawisz.

Ustawienie zasięgu działania

Wyróżnia się 3 zasięgi pracy, w których Aktywator może odebrać sygnał. Zasięgi te, w idealnych warunkach przedstawiają się następująco:

Krótki – 3-5m
Średni – 5-7m
Długi – 7-9m

Domyślnie ustawiony jest średni – 5-7m. Aby włączyć tryb ustawień zasięgu, naciśnij i przytrzymaj przyciski 1 i 2 razem przez 2 sekundy. Następnie, krótko naciskamy jeden z trzech przycisków, aby wybrać aktualnie wymagany zakres:

Przycisk 1 – 3-5m
Przycisk 2 – 5-7m
Przycisk 3 – 7-9m:

Naciśnij i przytrzymaj przyciski 1 i 2, aby wyłączyć tryb ustawień zasięgu.

Prosimy zwrócić uwagę, na: Niniejsze wielkości zasięgu są przybliżone, ponieważ zasięg może różnić się z powodu czynników takich jak temperatura otoczenia, wilgotność, widzialność pomiędzy bazą, a anteną aktywatora.

Ustawienie włączania/wyłączania nagrywania

Aby włączyć tryb nagrywania, naciśnij i przytrzymaj przyciski 2 i 3 razem przez 2 sekundy. Biała dioda błysnie jeden raz, gdy tryb nagrywania jest włączony i dwukrotnie, gdy tryb nagrywania jest wyłączony.

UŻYWANIE BAZY

Nagrywanie Komunikatów

Naciśnij i przytrzymaj **ANN1**, **ANN2** lub **ANN3**. Mów wyraźnie, gdy usłyszysz dźwięk piknięcia.

Zwolnij przycisk **ANN1**, **ANN2**, lub **ANN3**, baza automatycznie odtworzy nagrany komunikat. Możesz w dowolnym momencie nacisnąć przycisk **ANN1**, **ANN2**, lub **ANN3** aby odsłuchać komunikat. Biała dioda będzie błyskać w czasie odtwarzania.

W sumie dostępne jest 10 minut czasu nagrania, który może zostać podzielony jakkolwiek chcesz na **ANN1**, **ANN2** i **ANN3** na przykład: **ANN1** mógłby mieć komunikat o długości 1.5 minuty, **ANN2** mógłby mieć komunikat o długości 4.5 minuty, **ANN3** może mieć wtedy komunikat równy pozostałemu czasowi, czyli 4 minuty.

Prosimy zwrócić uwagę, że całkowity czas nagrania jest współdzielony przez **ANN1**, **ANN2** i **ANN3**.

Jeśli chcesz zmienić dowolny komunikat, musisz ponownie nagrać wszystkie trzy, aby uniknąć przekroczenia całego dostępnego czasu nagrania, tj. 10 minut.

Ważne: Przed ponownym nagraniem komunikatów, proszę upewnić się, że skasowano wcześniej nagrane komunikaty. Aby skasować komunikaty, naciśnij i przytrzymaj przycisk ANN1 i zwolnij go natychmiast gdy usłyszysz piknięcie.

Powtórz tę procedurę dla **ANN2** i **ANN3**.

Operatorzy powinni zrozumieć, że jakość nagrań, treść dostarczanej informacji oraz lokalizacja instalacji bazy są czynnikami krytycznymi w uzyskaniu sukcesu w korzystaniu z systemu STEP-HEAR™.

- 1) Nagrywaj komunikaty w cichym środowisku bez hałasu i innych dźwięków.
- 2) Starannie zdecyduj o liczbie strategicznych punktów instalacji jednostek bazy na wybranym obszarze.
- 3) Komunikaty powinny być istotne i odpowiednie do obszaru niezależnie z którego kierunku ktoś może przybyć, szczególnie gdy podawany jest kierunek. Nie używaj stwierżeń: "w lewo", "w prawo" ale ogłaszaj nazwę miejsca: "winda", "toaleta" itd.

Prosimy zwrócić uwagę, że: Jednostki bazy powinny być instalowane z zachowaniem odległości przynajmniej 20 metrów pomiędzy nimi.

Prosimy ustawić tryb nagrywania na **OFF** po zakończeniu nagrania własnych komunikatów. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przyciski 2 i 3 razem przez 2 sekundy. Biała dioda błysnie dwukrotnie, gdy tryb nagrywania zostanie wyłączony.

Step Hear nie jest odpowiedzialny za treści komunikatów głosowych lub jakichkolwiek nagrań, odtwarzanych z baz Step Hear. Za wszelką zawartość nagrań na bazie, odpowiada jej serwisant/właściciel.

UŻYWANIE BAZY

Nagrywanie komunikatu przez zewnętrzny sprzęt audio

Podłącz kabel audio do zewnętrznego gniazdka audio, znajdującego się w górnej części bazy.

Naciśnij i przytrzymaj przyciski 2 i 3 przez 2 sekundy, aby uruchomić nagrywanie.

Naciśnij i przytrzymaj **ANN1**, **ANN2** lub **ANN3** i włącz swoje urządzenie audio, gdy usłyszysz dźwięk piknięcia, aby rozpocząć nagrywanie dźwięku z urządzenia audio, np. ipod lub iphone.

Zwolnij przycisk **ANN1**, **ANN2**, lub **ANN3**, baza automatycznie odtworzy nagrany komunikat. Możesz w dowolnym momencie nacisnąć przycisk **ANN1**, **ANN2**, lub **ANN3** aby odsłuchać komunikat. Biała dioda będzie błyskać w czasie odtwarzania.

Prosimy zwrócić uwagę, że: Ustaw tryb nagrywania na **OFF** po zakończeniu nagrywania komunikatu. Aby to zrobić, naciśnij i przytrzymaj przyciski 2 i 3 razem przez 2 sekundy. Biała dioda błysnie dwukrotnie, gdy tryb nagrywania zostanie wyłączony.

Ustawienie poziomu głośności

Głośność odtwarzania będzie automatycznie ustawiana, zależnie od poziomu hałasu w otaczającym środowisku. W głośnym środowisku, poziom głośności będzie ustawiony na wyższym poziomie, niż w środowisku cichym. Jednakże, jeśli te domyślne ustawienia nie są odpowiednie, to głośność może zostać ustawiona ręcznie, jak pokazano poniżej:

Gdy komunikat jest odtwarzany w hałaśliwym środowisku, naciśnij przycisk 1 aby ustawić głośność odtwarzania. Dostępne są trzy poziomy głośności. Naciśnij przycisk 1 jednokrotnie - poziom głośności jest ustawiony na 1, naciśnij go dwukrotnie - poziom głośności ustawiony jest na 2, naciśnij go trzy razy - poziom głośności ustawiony jest na 3. Jeśli naciśniesz przycisk 1 ponownie, to poziom głośności powróci do 1. Aby sprawdzić bieżące ustawienia głośności, odtwórz od razu komunikat głosowy.

Gdy komunikat jest odtwarzany w cichym środowisku, naciśnij przycisk 3 aby ustawić głośność odtwarzania. Dostępne są trzy poziomy głośności. Działanie jest takie samo, jak w przypadku ustawień poziomu głośności w hałaśliwym środowisku.

Rozwiązywanie problemów

Komunikaty nie są odtwarzane

- Upewnij się, że panel słoneczny jest podłączony do bazy i zasilanie słoneczne jest dostarczane
- Upewnij się, czy baza jest włączona
- Upewnij się, że komunikaty zostały nagrane

Nie można nagrać Komunikatu

- Upewnij się, że tryb nagrywania jest włączony
- Upewnij się, że panel słoneczny jest podłączony do bazy i zasilanie słoneczne jest dostarczane

Brak wibracji i/lub pikania, gdy aktywator znajduje się w zasięgu bazy

- Zmień ustawienia zasięgu
- Upewnij się, że panel słoneczny jest podłączony do bazy i zasilanie słoneczne jest dostarczane

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE

Ogólne

Nie otwieraj obudowy urządzenia. W sprawie wszelkich napraw, kontaktuj się telefonicznie z numerem pomocy.

Czyszczenie

Czyść bazę przy pomocy miękkiego kawałka materiału. Nigdy nie używaj środków czyszczących lub polerujących - mogą one uszkodzić wykończenie obudowy lub elektronikę wewnętrzną.

Warunki używania (środowisko)

Zawsze upewnij się, że jest swobodny przepływ powietrza wokół obudowy bazy. Nie narażaj produktu na działanie ognia oraz innych niebezpiecznych czynników.

GWARANCJA (EU)

Od momentu zakupu produktu STEP-HEAR™, STEP-HEAR™ daje gwarancję na ten produkt przez okres jednego roku. W czasie tego okresu, wszystkie naprawy lub wymiany (według naszego uznania) są wykonywane bezpłatnie. Napotykając na jakikolwiek problem, powinieneś skontaktować się z naszą pomocą telefonicznie lub odwiedzić naszą stronę Web pod adresem www.step-hear.com. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wypadkami, zaniedbaniem lub rozbiciem jakichkolwiek elementów. Produkt nie może nosić śladów jakichkolwiek manipulacji, oraz nie może być przekazywany dalej do kogokolwiek, kto nie jest autoryzowanym reprezentantem STEP-HEAR™. Gwarancja STEP-HEAR™ w żadnym wypadku nie ogranicza Państwa praw.

**WAŻNE: TWÓJ DOWÓD ZAKUPU JEST CZĘŚCIĄ
GWARANCJI. MUSI BYĆ ZACHOWANY I OKAZANY W
PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA
GWARANCYJNEGO.**

Prosimy zwrócić uwagę, na: Gwarancja odnosi się do:
Wyłącznie obszaru EU



GWARANCJA

Deklaracja: Step-Hear niniejszym deklaruje, że SH-300 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i istotnymi warunkami Dyrektywy 1999/5/EC.

Kopię deklaracji zgodności z istotnymi warunkami dyrektywy 1999/5/EC można znaleźć pod adresem www.step-hear.com

GWARANCJA (USA)

STEP-HEAR Ltd gwarantuje, że produkt STEP-HEAR będzie wolny od wad materiałowych lub wykonania przez okres jednego roku od daty zakupu.

Jeśli napotkasz na jakikolwiek problem, powinieneś skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta.

Przechowaj bezpiecznie dokument sprzedaży jako dowód daty zakupu na wypadek, gdyby konieczna była usługa gwarancyjna.

W okresie jednego roku od daty zakupu, STEP- Ltd naprawi lub wymieni (według naszego uznania) Twój STEP- produkt bezpłatnie, jeśli zostanie wykryta wada materiału lub wykonania. Jeśli zdecydujemy się na wymianę Twojego produktu STEP-HEAR, możemy wymienić go na nowy lub naprawiony produkt o takim samym lub podobnym wzornictwie.

Naprawa lub wymiana jest objęta gwarancją przez okres 90 dni lub do końca okresu oryginalnej gwarancji, zależnie, który z nich jest dłuższy.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez wandalizm, przypadki zaniedbania, uszkodzenia transportowe, używanie niezgodne z instrukcją, niewłaściwe używanie, ogień, zalanie, użycie niezgodnych akcesoriów lub działanie sił wyższych. Produkt nie może nosić śladów jakichkolwiek manipulacji, oraz nie może być przekazywany dalej do kogokolwiek, kto nie jest autoryzowanym reprezentantem STEP-HEAR™. Gwarancja STEP-HEAR™ w żadnym wypadku nie ogranicza Twoich praw.

STEP- Ltd nie bierze odpowiedzialności za straty czasu, niewygody, uszkodzenie własności lub dowolne uszkodzenia przypadkowe lub trwałe spowodowane przez Twój produkt STEP-HEAR

Serwis gwarancyjny, dostępny jest wyłącznie na podstawie dowodu zakupu.

WAŻNE: TWÓJ DOKUMENT ZAKUPU JEST CZĘŚCIĄ GWARANCJI. MUSI BYĆ ZACHOWANY I OKAZANY W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA GWARANCYJNEGO.

Aby uzyskać pomoc i wsparcie produktu, odwiedź naszą stronę Web:
www.step-hear.com

Lub skontaktuj się z naszym przedstawicielem w **Ameryce Północnej**:

2288A Queen Street East
Toronto, ON M4E1G6, Kanada
T: 347.482.1557
F: 801.760.9791

DYREKTYWY RECYKLINGU

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny - WEEE (ang. Waste Electrical and Electronic Equipment) po jego zużyciu musi być oddany do miejsc, gdzie w sposób najlepszy, produkty takie poddawane są recyklingowi.

Gdy niniejszy produkt zakończy swoją funkcję i zostanie skasowany, nie wyrzucaj go do domowego kosza na śmieci.

Prosimy użyć jednej z poniższych opcji pozbywania się śmieci:

- Usuń baterie i umieść je w przeznaczonym na WEEE kontenerze na śmieci. Umieść produkt w przeznaczonym na WEEE kontenerze na śmieci.

- Lub, oddaj swój stary produkt do sprzedawcy. Jeśli kupujesz nowe urządzenie, powinno to zostać przyjęte.

W ten sposób, jeśli będziesz respektował niniejszą instrukcję, przyczynisz się do zapewnienia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska.



Aby uzyskać pomoc i wsparcie techniczne dotyczące produktu, prosimy odwiedzić naszą stronę Web pod adresem

www.step-hear.com

Kontakt Geemarc -01707 372372

lub Geemarc Francja- +33 (0) 3 28 58 75 75

UGSH-200v01