

# Krzeseło ewakuacyjne EV-4000

## Podręcznik użytkownika

Altix Sp. z o. o.



**SAFETY CHAIR**

Eksperti od bezpiecznej ewakuacji

Podręcznik użytkownika krzesła ewakuacyjnego EV-4000 Wersja EV4000-2 09/20

Producent Safety Chair 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania

Dystrybutor Altix Sp. z o. o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa, tel.: 22 510 10 90

<http://sklep.altix.pl/pl/krzeslo-ewakuacyjne-ev4000>



**Spis treści**

Wytyczne eksploatacyjne krzesła ewakuacyjnego EV-4000..... 2  
Rekomendacje dotyczące obsługi..... 3  
Otwieranie krzesła ewakuacyjnego..... 4  
Przygotowanie do transportu po schodach..... 5  
Transport po schodach w dół..... 5  
Transport na powierzchniach poziomych..... 7  
Instalacja krzesła ewakuacyjnego na czas przechowywania..... 8  
Informacje dotyczące bezpieczeństwa..... 8  
Notatki ..... 9

**Wytyczne eksploatacyjne krzesła ewakuacyjnego EV-4000**



Ważne parametry klatek schodowych:

- Dopuszczalna minimalna szerokość klatki schodowej 580 mm
- Dopuszczalne nachylenie schodów od 20° do 40 °

Uwaga: Krzesła ewakuacyjnych EV-4000 można używać jedynie na schodach prostych, nie można ich używać na schodach krętych.

Wymiary krzesła ewakuacyjnego EV-4000 po złożeniu:


- Wysokość 124 cm
- Szerokość 57 cm
- Głębokość 26,5 cm
- Waga 14,3 kg

Zalecenie dotyczące maksymalnego udźwigu podczas transportu po schodach 200 kg.


## Rekomendacje dotyczące obsługi

Zaleca się, by szkolenia z obsługi krzesła ewakuacyjnego odbywały się regularnie, najlepiej podczas ćwiczeń przeciwpożarowych. W przypadku plastikowych lub syntetycznych końcówek schodowych, transportu osób o dużej wadze ciała lub w przypadku stromych schodów nachylonych pod dużym kątem, prędkość transportu w dół może wzrosnąć, dlatego zaleca się obsługę krzesła ewakuacyjnego przez dwie osoby. By uzyskać wskazówki lub informacje o szkoleniach, należy się skontaktować ze sprzedawcą krzesła. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia schodów w czasie ewakuacji.

## Otwieranie krzesła ewakuacyjnego

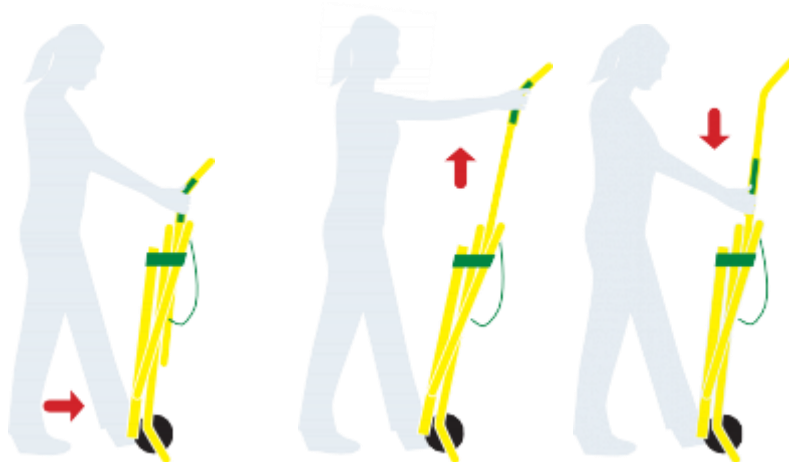


1. Trzymając krzesło w pozycji pionowej obiema rękami z odchylonym uchwytem, należy położyć jedną stopę na podstawie ramy krzesła.
2. Trzymając uchwyt za zagłówek, trzeba podnieść go aż do momentu, gdy zaciski zabezpieczające zablokują uchwyt na miejscu.
3. Przesunąć zagłówek w dół.

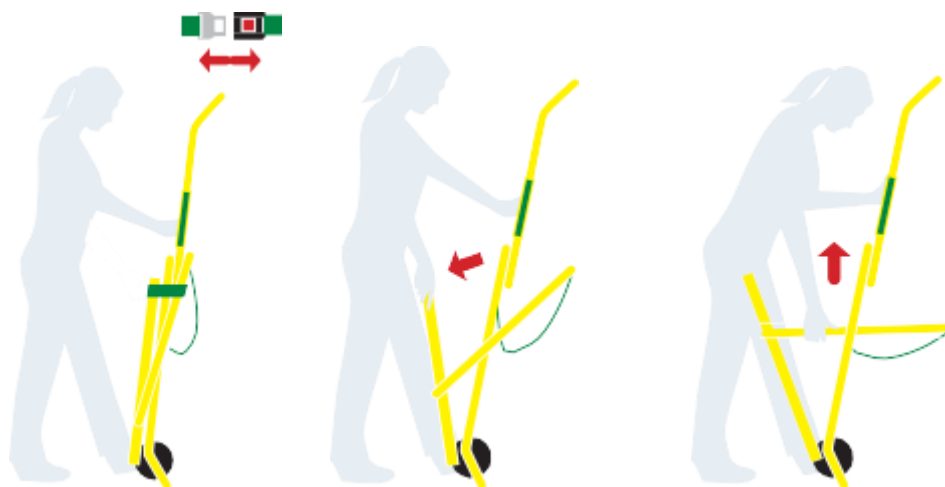

4. Odpiąć pas bezpieczeństwa przeznaczony dla osoby transportowanej, by zwolnić szyny ślizgowe krzesła.
5. Pociągnąć szyny ślizgowe do siebie, nieruchomo trzymając rączkę fotela i opierając stopę na podstawie ramy krzesła.
6. Przesunąć ramę siedziska do góry, aż się zatrzyma i zablokuje na swoim miejscu.


## Przygotowanie do transportu po schodach

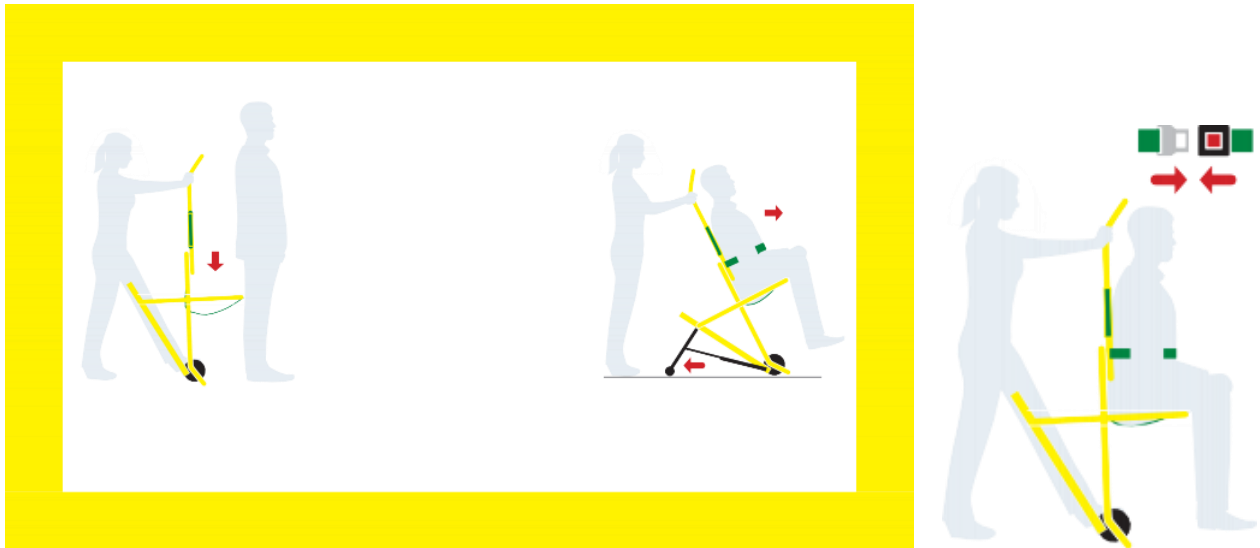

1. Należy trzymać krzesło pionowo z jedną nogą umieszczoną nieruchomo na podstawie jego ramy.
2. Osoba transportowana może następnie być przeniesiona na siedzenie krzesła. Po usadowieniu osoby transportowanej należy jej zapiąć pasy bezpieczeństwa.
3. W celu komfortowego przemieszczania osoby transportowanej na początek szczytu schodów, należy użyć stopy, by rozłożyć zespół tylnego koła.


## Transport po schodach w dół

1. Po osiągnięciu szczytu schodów należy ustawić krzesło w pozycji równowagi i zamknąć zespół tylnego koła.
2. Pochylić krzesło do tyłu i obiema rękami trzymać za trzonki uchwytów, następnie pchać krzesło pewnie po schodach.
3. Podczas przemieszczania krzesła w dół schodów, należy zatrzymywać się i sprawdzać, czy koło i szyny ślizgowe krzesła mają kontakt ze schodami.

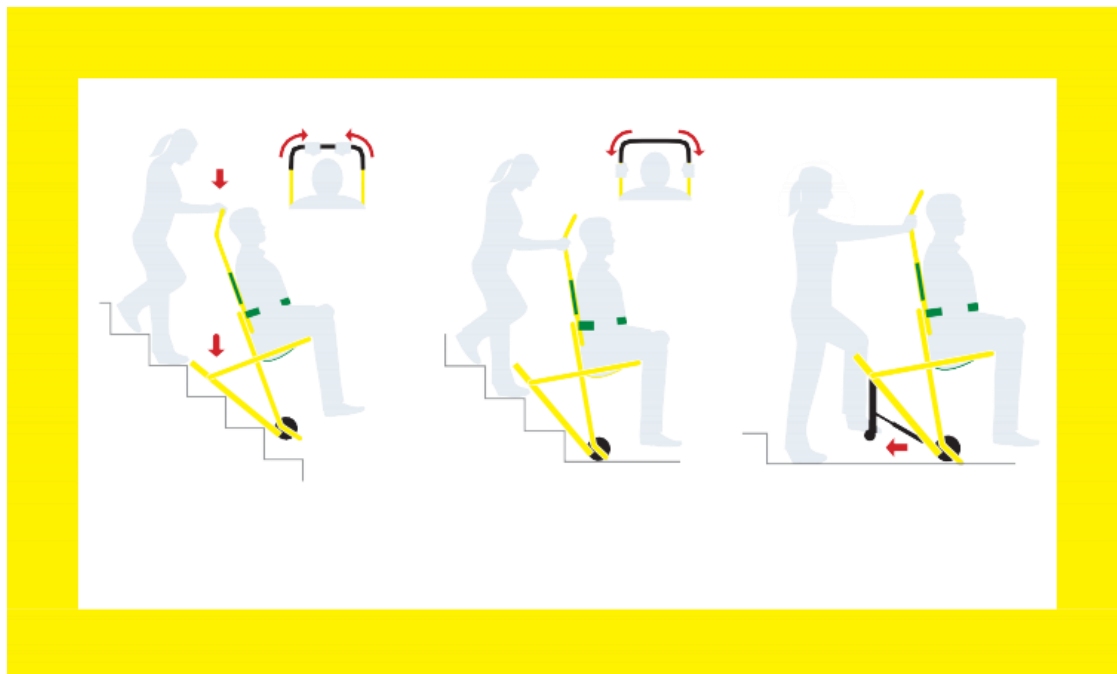

4. Nie zwalniając ruchu krzesła, należy umieścić ręce na uchwycie i pchnąć w dół, by zsunąć krzesło po schodach.
5. Po dotarciu do końca schodów, gdy przednie koło dotknie poziomego podłoża, przesunąć ręce z powrotem na trzonki boczne uchwytu.
6. Po dotarciu do płaskiego podłoża, tylny zespół wózka można rozłożyć, by krzesło było gotowe do jazdy po powierzchni poziomej.

## Transport na powierzchniach poziomych

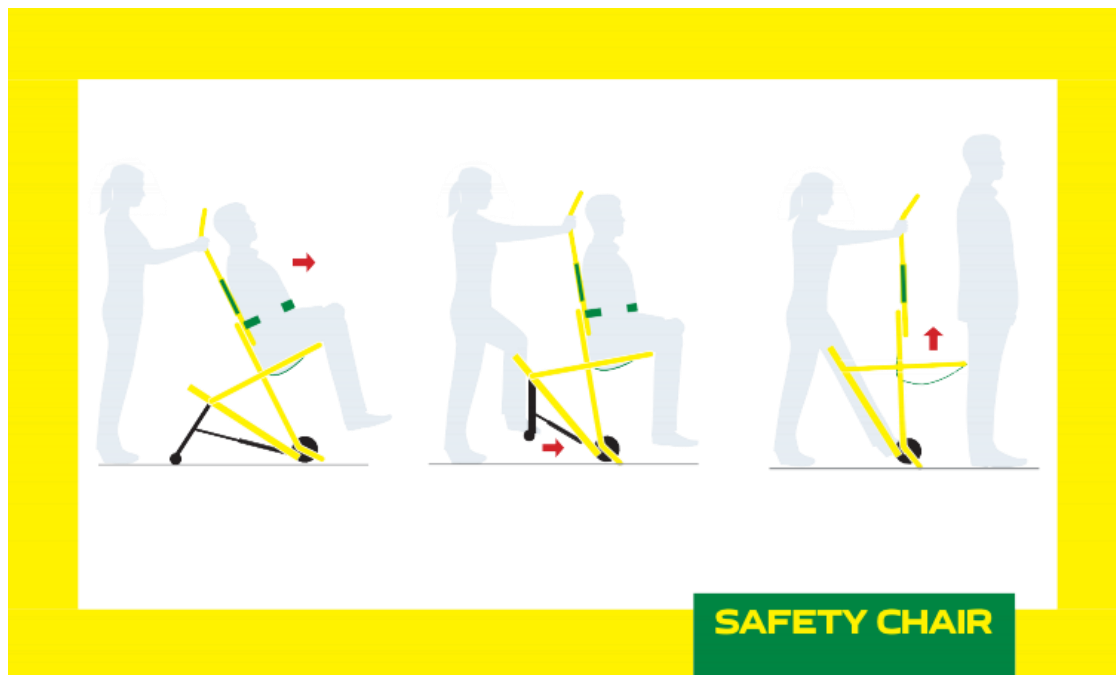

1. Po rozłożeniu zespołu tylnego koła osoba transportowana może zostać przewieziona do bezpiecznego punktu ewakuacyjnego lub do wyjścia.
2. Po oddaleniu się od strefy zagrożenia można zamknąć tylny zespół krzesła ewakuacyjnego.
3. Przechylić ramę krzesła do przodu, by transportowana osoba mogła opuścić krzesło ewakuacyjne.

## Instalacja krzesła ewakuacyjnego na czas przechowywania



1. W przypadku przechowywania krzesła na wsporniku ściennym, należy przymocować wspornik za pomocą dostarczonych śrub (rozstaw śrub 762 mm). Po zamontowaniu haczyków ściennych krzesło można zawiesić na poziomej rozporce znajdującej się za siedzeniem krzesła.
2. Krzesło można zabezpieczyć, umieszczając na nim ochronną osłonę przeciwpyłową.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zdecydowanie zaleca się, by krzesło ewakuacyjne EV-4000 obsługiwał wyłącznie przeszkolony personel posiadający certyfikat. Nieprzeszkolony personel może spowodować obrażenia lub uszkodzenia ciała osób transportowanych.
- Krzesło ewakuacyjne EV-4000 może być używane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie krzesła ewakuacyjnego może spowodować obrażenia lub uszkodzenia ciała osób transportowanych.
- Krzesło ewakuacyjne EV-4000 powinno być obsługiwane wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia lub uszkodzenia ciała osób transportowanych.
- Zawsze należy używać dostarczonych pasów bezpieczeństwa, by zabezpieczyć na krześle osobę transportowaną. Niezabezpieczona osoba transportowana może spaść z krzesła, doznając obrażeń lub uszkodzenia ciała.



- W miarę możliwości należy korzystać z pomocy innych pracowników. Trzeba utrzymywać kontrolę nad krzesłem, nadzorując cały zespół pomocniczy.
- Serwis może być wykonywany wyłącznie przez inżynierów firmy Safety Chair. Niewłaściwa konserwacja może spowodować uszkodzenie krzesła ewakuacyjnego i ewentualne obrażenia u osób transportowanych na nim.
- Nie należy zostawiać osoby transportowanej bez opieki. Pozostawienie jej bez opieki może spowodować obrażenia lub uszkodzenia ciała.
- Smarowanie systemu szyn ślizgowych może spowodować wywrócenie się krzesła i obrażenia u osoby transportowanej lub u operatorów. Pod żadnym pozorem nie można smarować szyn ślizgowych i gąsienic krzesła ewakuacyjnego, ani jego pasów bezpieczeństwa.
- Mocowanie niewłaściwych przedmiotów na krzesle ewakuacyjnym może spowodować obrażenia osób. Do obsługi krzesła ewakuacyjnego należy używać wyłącznie elementów zatwierdzonych przez firmę Safety Chair.
- Do obsługi krzesła ewakuacyjnego należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę Safety Chair i korzystać wyłącznie z usług autoryzowanych serwisantów. Niewłaściwe części mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenia ciała osób transportowanych.
- Krzesło ewakuacyjne zostało zaprojektowane wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Modyfikowanie krzesła ewakuacyjnego może spowodować obrażenia i uszkodzenia ciała osób transportowanych.

## Notatki

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Producent Safety Chair 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania

Dystrybutor Altix Sp. z o. o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa, tel.: 22 510 10 90

<http://sklep.altix.pl/pl/krzeslo-ewakuacyjne-ev4000/>

**SAFETY CHAIR**

Wersja EV4000-2 09/20

Producent Safety Chair 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania

Dystrybutor Altix Sp. z o. o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa, tel.: 22 510 10 90

[http://sklep.altix.pl/pl/krzeslo-ewakuacyjne-ev4000](http://sklep.altix.pl/pl/krzeslo-ewakuacyjne-ev4000/)