

Krzeseło ewakuacyjne EV-7000

Instrukcja obsługi

Altix Sp. z o. o.




SAFETY CHAIR

Eksperti od bezpiecznej ewakuacji

Producent Safety Chair 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania

Dystrybutor Altix Sp. z o. o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa, tel.: 22 510 10 90

<http://sklep.altix.pl/pl/krzeslo-ewakuacyjne-ev7000>

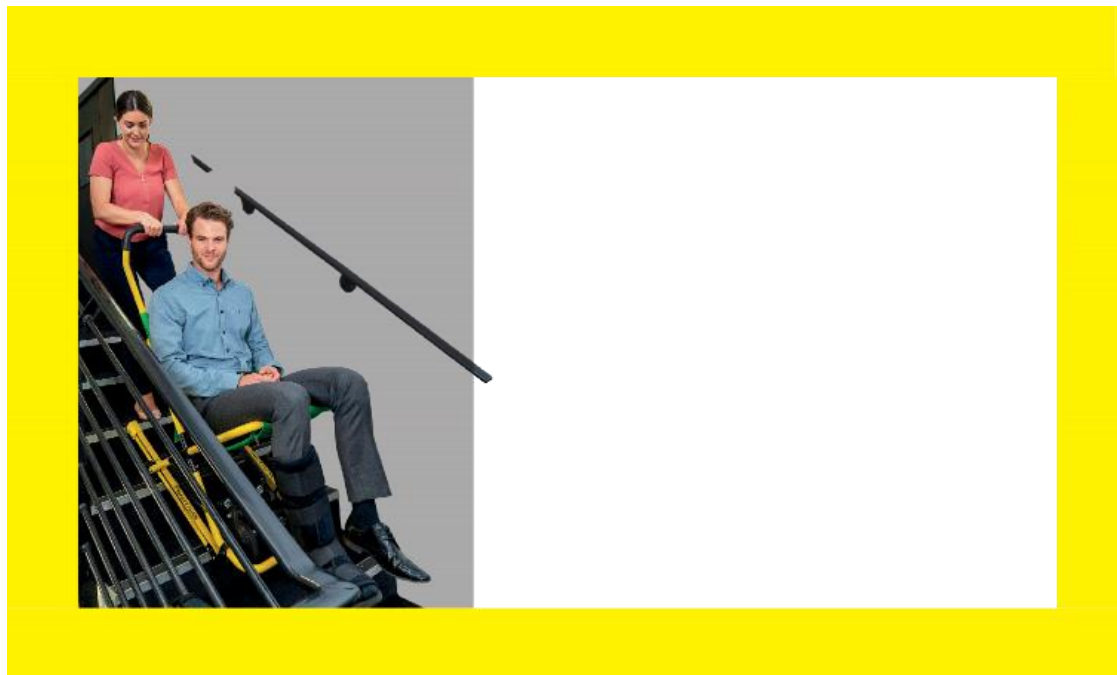

Spis treści

Wytyczne eksploatacyjne krzesła ewakuacyjnego EV-7000.....	3
Otwieranie krzesła ewakuacyjnego.....	3
Transport pasażera	6
Transport po schodach w dół.....	8
Transport po powierzchniach poziomych	11
Transport po schodach w górę	11
Instalacja.....	12
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	13



Wytyczne eksploatacyjne krzesła ewakuacyjnego EV-7000


Wysokość 124 cm
Szerokość 57 cm
Głębokość 26,5 cm
Waga 17 kg.

Rekomendacje

Zaleca się, by szkolenia z obsługi krzesła ewakuacyjnego odbywały się regularnie, najlepiej podczas ćwiczeń przeciwpożarowych. W przypadku plastikowych lub syntetycznych końcówek schodowych, osób transportowanych o dużej wadze ciała lub stromych schodów nachylonych pod dużym kątem, prędkość transportu w dół może wzrosnąć, dlatego zaleca się obsługę krzesła ewakuacyjnego przez dwie osoby. Aby uzyskać wskazówki lub informacje o szkoleniach, należy się skontaktować ze sprzedawcą. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia schodów w czasie ewakuacji.

Zalecenie dotyczące maksymalnego udźwigu podczas transportu po schodach do 250 kg.

Otwieranie krzesła ewakuacyjnego

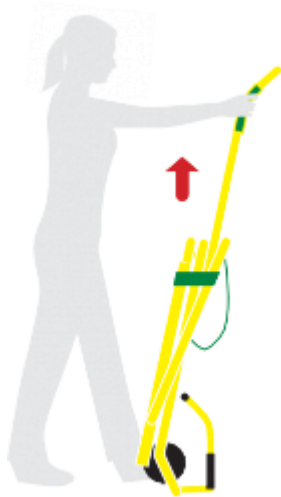

1. Trzymając krzesło obiema rękami w pozycji pionowej, z wygięciem uchwyty od siebie, postawić jedną stopę na podstawie ramy krzesła.




2. Trzymając uchwyt za zagłówek, należy podnieść go aż do momentu, gdy zaciski zabezpieczające zablokują uchwyt na miejscu.




3. Przesunąć zagłówek do dołu.



4. Odpiąć pas bezpieczeństwa przeznaczony dla osoby transportowanej, by zwolnić szyny ślizgowe krzesła.

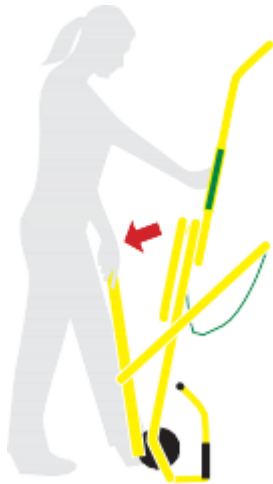


5. Pociągnąć szyny ślizgowe do siebie, nieruchomo trzymając rączkę fotela i opierając stopę na podstawie ramy krzesła.

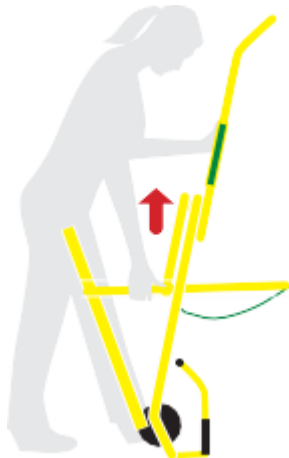


6. Przesunąć ramę siedziska do góry, aż się zatrzyma i zablokuje na swoim miejscu.


Transport pasażera

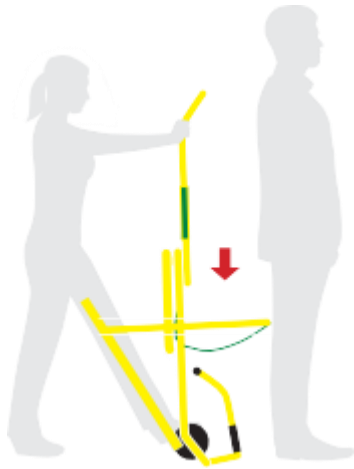

1. Należy trzymać krzesło pionowo z jedną nogą umieszczoną nieruchomo na podstawie ramy krzesła.

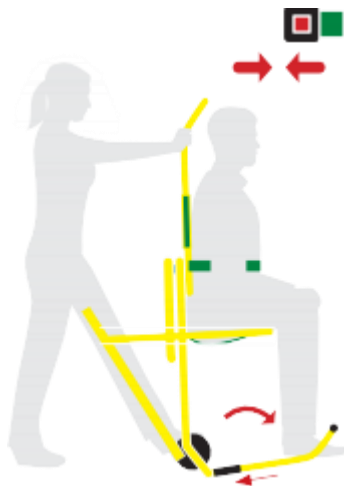


2. Osoba transportowana może teraz zostać przeniesiona na siedzenie krzesła. Należy zapiąć jej pas bezpieczeństwa i rozłożyć podnózek, a także zablokować krzesło, przesuwając kołnierz blokujący nad przegubem zawiasowym.

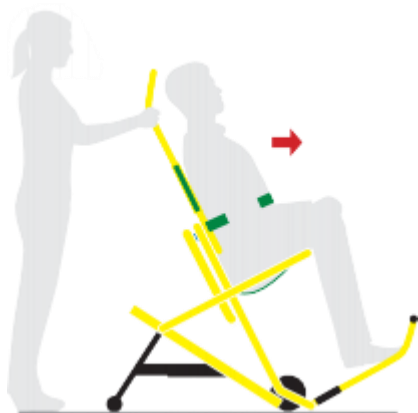


3. W celu komfortowego przemieszczania osoby transportowanej do szczytu schodów, należy użyć stopy, by rozłożyć zespół tylnego koła.


Transport po schodach w dół

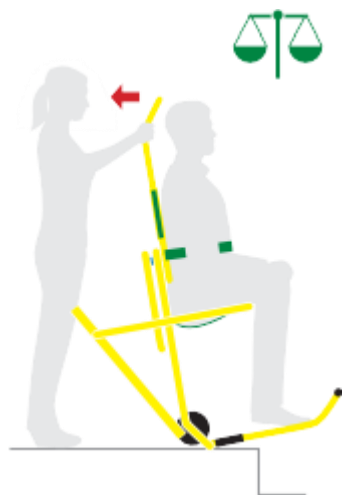

1. Po osiągnięciu szczytu schodów należy ustawić krzesło w pozycji równowagi i zamknąć zespół tylnego koła.

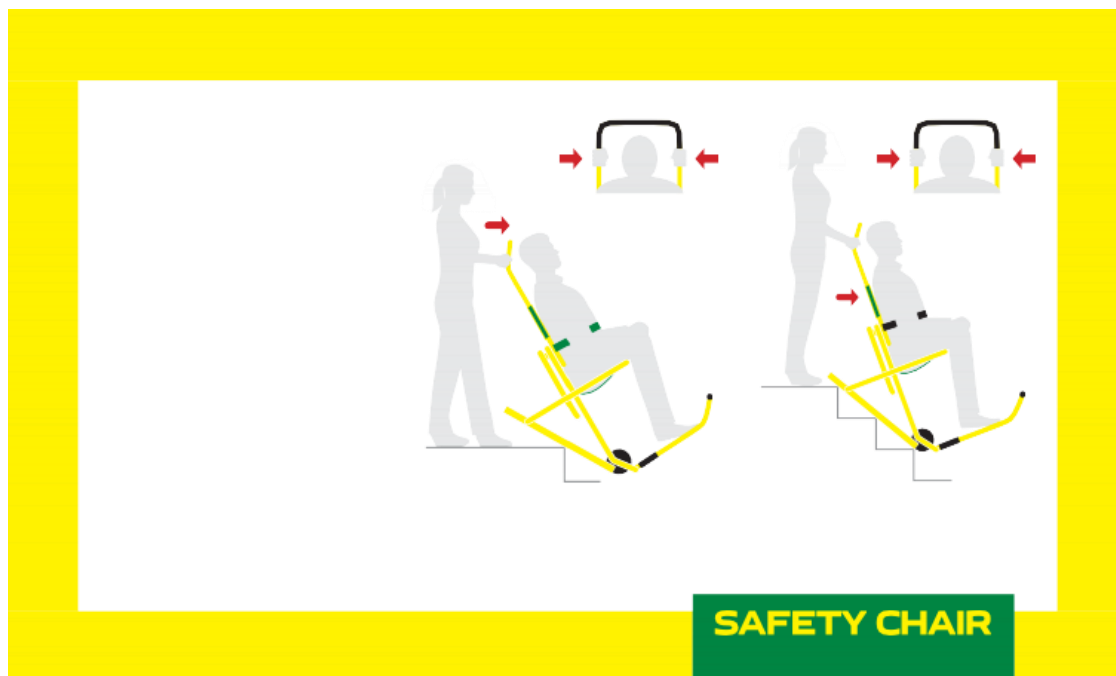

2. Pochylić krzesło do tyłu i obiema rękami trzymać za trzonki rękojeści, następnie pchać pewnie po schodach.
3. Podczas spuszczenia krzesła po schodach, zatrzymywać się, sprawdzając czy koło i szyny ślizgowe krzesła mają kontakt ze schodami.

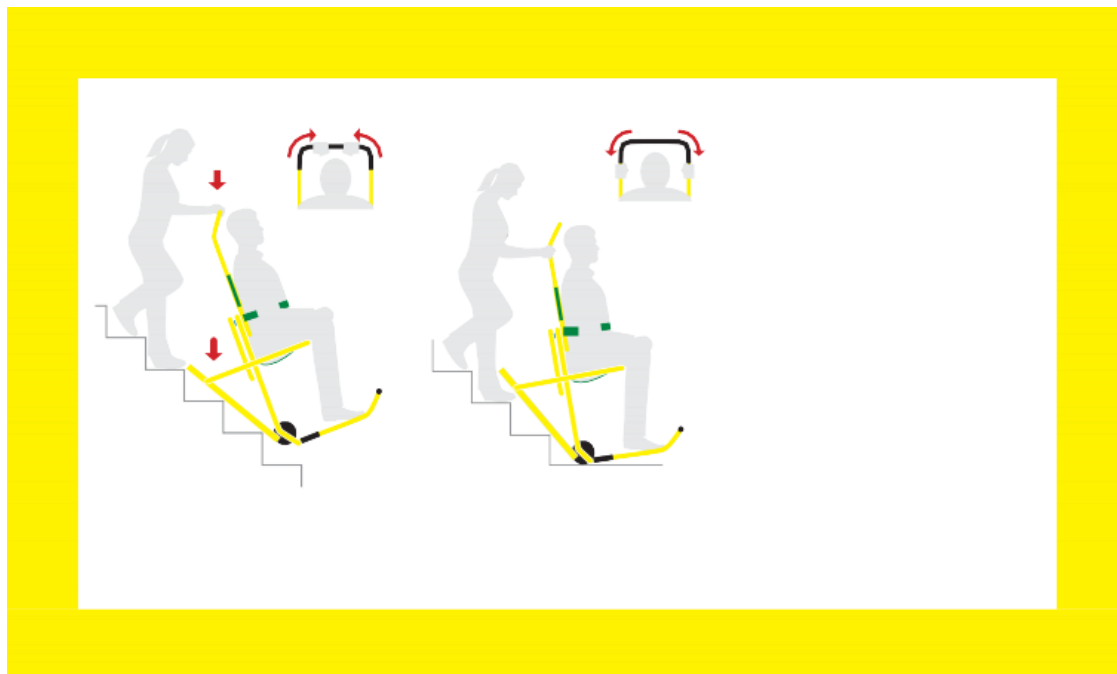

4. Nie zwalniając ruchu krzesła, należy umieścić ręce na uchwycie i pchnąć w dół, by zsunąć krzesło w dół schodów.
5. Po dotarciu do końca schodów, gdy przednie koło dotknie poziomej podłogi, przesunąć ręce z powrotem na trzonki boczne uchwytu.




6. Po dotarciu do płaskiego terenu, tylny zespół wózka można rozłożyć, by krzesło było gotowe do jazdy po powierzchni poziomej.

Transport po powierzchniach poziomych




1. Po rozłożeniu zespołu tylnego koła, osoba transportowana może zostać przeniesiona do bezpiecznego punktu ewakuacyjnego lub do wyjścia.

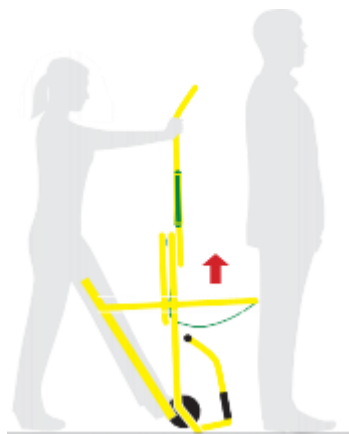


2. Po oddaleniu się od strefy zagrożenia można złożyć podnózek, a następnie zamknąć tylny zespół krzesła ewakuacyjnego. Przechylić ramę do przodu, by osoba transportowana mogła opuścić krzesło.

Transport po schodach w górę

Podczas przenoszenia na krzesło osoby transportowanej po schodach w górę, potrzebna będzie asysta dwóch lub czterech osób.

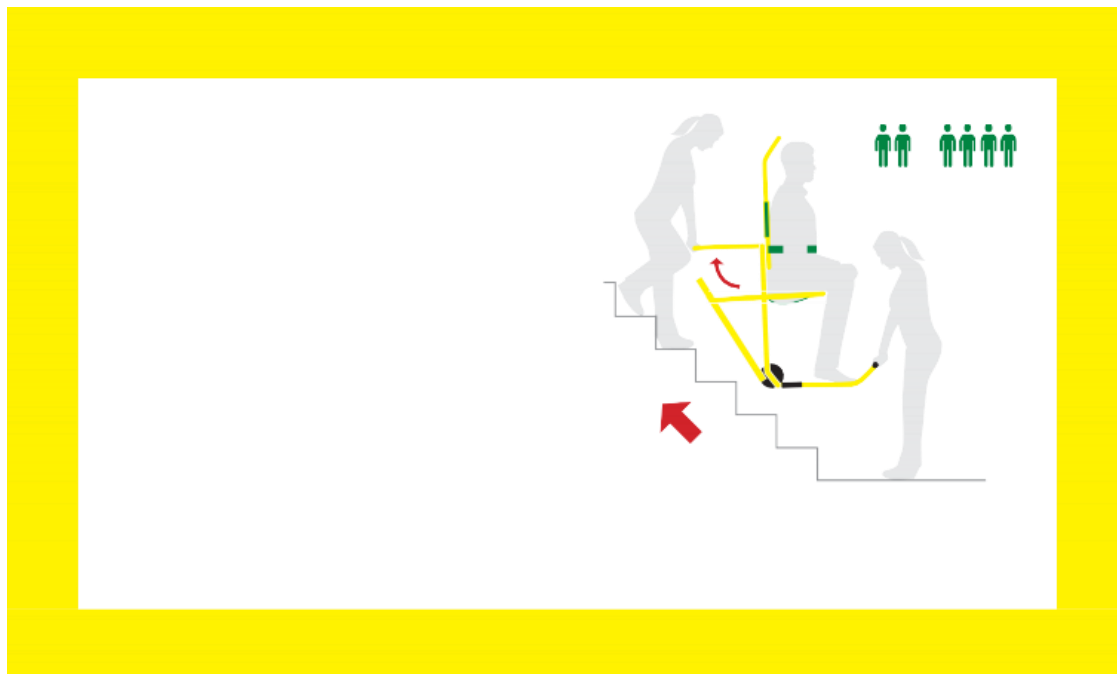


1. Należy ustawić i oprzeć szyny ślizgowe krzesła na schodach, uwolnić pas zabezpieczający i całkowicie wysunąć tylny uchwyt do podnoszenia, kołysząc nim w górę.

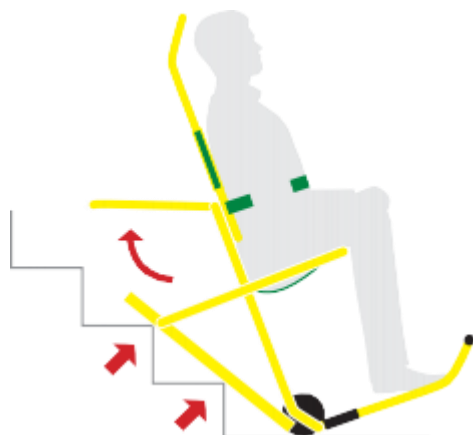

2. Współpracując, powoli podnieść krzesło i wspinać się po schodach, pokonując jeden stopień na raz.

Instalacja

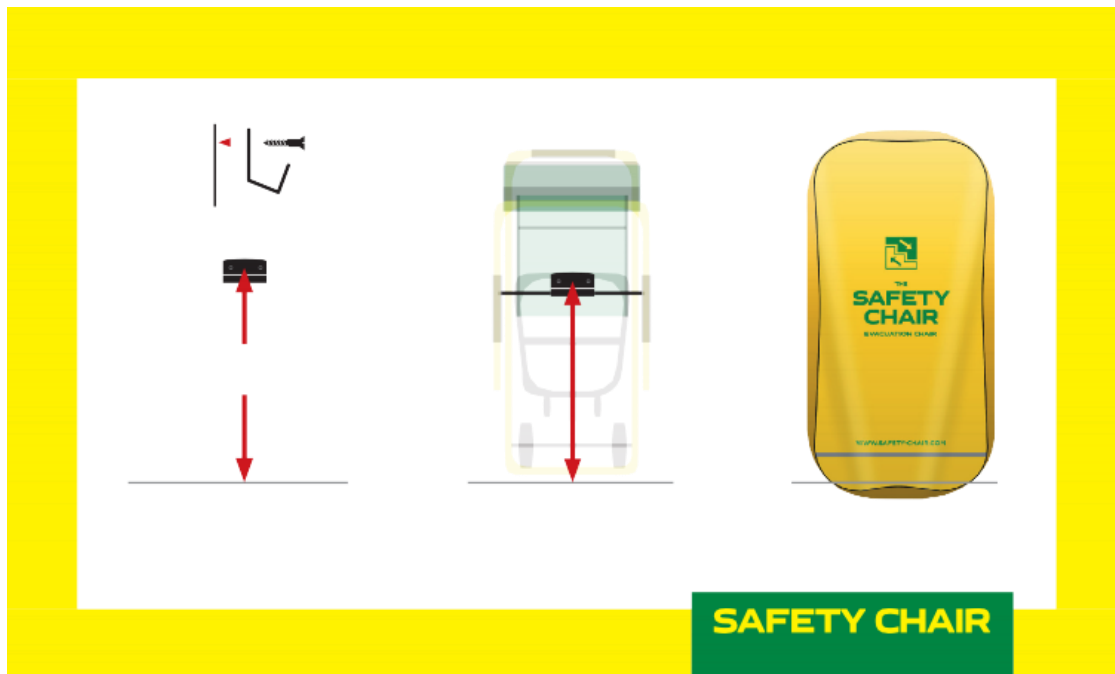

1. Jeśli krzesło ewakuacyjne przechowywane jest na wsporniku ściennym, należy przymocować wspornik przy użyciu dostarczonych śrub tak, by dopasować się do wymaganych wymiarów. Wspornik powinien się znajdować na wysokości 762 mm.
2. Po zamocowaniu haczyków ściennych krzesło można zawiesić na poziomej rozpórce znajdującej się za jego siedziskiem krzesła.
3. Ochronną osłonę przeciwpylową można umieścić na zainstalowanym krześle ewakuacyjnym tak, jak pokazano na powyższym rysunku.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Zdecydowanie zaleca się, by krzesło ewakuacyjne EV-7000 obsługiwał wyłącznie przeszkolony personel posiadający certyfikaty. Nieprzeszkolony personel może spowodować obrażenia lub uszkodzenia u osób transportowanych.
- Krzesło ewakuacyjne EV-7000 może być używane wyłącznie w celach opisanych w niniejszej instrukcji. Niewłaściwe użytkowanie krzesła ewakuacyjnego może spowodować obrażenia lub uszkodzenia u osób transportowanych.
- Krzesło ewakuacyjne EV-7000 powinno być obsługiwane wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji. Nieprawidłowa obsługa może spowodować obrażenia lub uszkodzenia u osób transportowanych.
- Zawsze należy używać dostarczonych pasów bezpieczeństwa, by zabezpieczyć na krześle osobę transportowaną. Niezabezpieczona osoba transportowana może spaść z krzesła, doznając obrażeń lub uszkodzenia ciała.

- W miarę możliwości należy korzystać z pomocy innych pracowników. Trzeba utrzymywać kontrolę nad krzesłem, nadzorując cały zespół pomocniczy.
- Serwis może być wykonywany wyłącznie przez inżynierów firmy Safety Chair. Niewłaściwa konserwacja może spowodować uszkodzenie krzesła ewakuacyjnego i ewentualne obrażenia u osób transportowanych na nim.
- Nie należy zostawiać osoby transportowanej bez opieki. Pozostawienie jej bez opieki może spowodować obrażenia lub uszkodzenia ciała.
- Smarowanie systemu szyn ślizgowych może spowodować wywrócenie się krzesła i obrażenia u osoby transportowanej lub u operatorów. Pod żadnym pozorem nie można smarować szyn ślizgowych i gąsienic krzesła ewakuacyjnego, ani jego pasów bezpieczeństwa.
- Mocowanie niewłaściwych przedmiotów na krześle ewakuacyjnym może spowodować obrażenia osób. Do obsługi krzesła ewakuacyjnego należy używać wyłącznie elementów zatwierdzonych przez firmę Safety Chair.
- Do obsługi krzesła ewakuacyjnego należy używać wyłącznie części dostarczanych przez firmę Safety Chair i korzystać wyłącznie z usług autoryzowanych serwisantów. Niewłaściwe części mogą spowodować obrażenia lub uszkodzenia u osób transportowanych.
- Krzesło ewakuacyjne zostało zaprojektowane wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Modyfikowanie krzesła ewakuacyjnego może spowodować obrażenia i uszkodzenia u osób transportowanych.



Producent Safety Chair 71-75 Shelton Street, Londyn, WC2H 9JQ, Wielka Brytania
Dystrybutor Altix Sp. z o. o., ul. Modlińska 246C, 03-152 Warszawa, tel.: 22 510 10 90
<http://sklep.altix.pl/pl/krzeslo-ewakuacyjne-ev7000>

SAFETY CHAIR

Wersja EV7000-3 04/21